

類別：機械器具 手術台及び治療台

一般医療機器 一般名称：手術台アクセサリ、JMDNコード：70469000

手術台レール

【 警 告 】

・間違った患者のポジショニングにより生命機能が害される場合がある。

正しく患者の位置を決めて、継続的な観察を維持すること。

【 禁 忌 ・ 禁 止 】


・本製品は当社が認めた者以外、修理・保守点検できない。

当社製品以外のアクセサリは使用しないこと。

【 形 状 ・ 構 造 及 び 原 理 】

- 1)構成
- (1)本体
- ① II 型（1 点固定）4 本
- ② II 型（1 点固定）4 本
- ③ I 型（2 点固定）2 本
- ④ II 型（1 点固定）2 本

2) 各部の名称

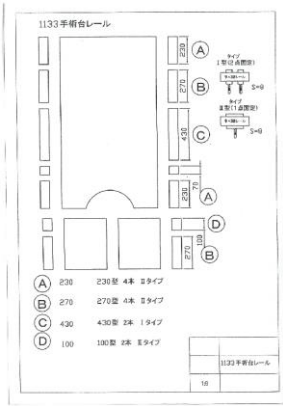

3) 原理

本手術台レールは、手術台の両側に取り付けられ、クランプ等により各種の付属品を取り付けることができる。

【 使用目的、効果、効能 】

本手術台レールは、手術台の両側に取り付けられ、クランプ等により、各種の手術台付属品を固定することを目的とした手術台アクセサリである。

【 品目仕様 】

- 1) 本体寸法及び質量
- ① 寸法（mm） 9×32×230 質量 0.52 k g
- ② 寸法（mm） 9×32×270 質量 0.61 k g
- ③ 寸法（mm） 9×32×430 質量 0.98 k g
- ④ 寸法（mm） 9×32×100 質量 0.21 k g
- 2) 手術台レールの耐荷重 最大 15 k g

【 操 方 又 は 使 用 方 法 】

- 使用環境状況
- 温度 常温
- 湿度 常湿
- 設置上の注意
- 手術台等から脱落しないことを確認し、しっかりと固定すること。
- 操作方法
- 1) 手術台テーブルの両側に手術台レールを取り付ける。
- 2) 手術台レールに、手術台付属品をクランプ等により固定する。

【 使用上の注意 】

- 1) 禁忌・休止
- ・摩擦またはダメージがある場合、しっかりと固定できない。
- ・完全な状態の製品を使用すること。
- 2) その他
- ・本アクセサリを廃棄する場合は産業廃棄物となり、必ず地方自治体の条例・規則に従い、許可を得た産業廃棄物処分業者に廃棄を依頼すること。

【 貯 蔵 方 法 及 び 使 用 期 間 】

- 貯蔵方法：本製品は、清浄にして保管すること。
- 使用耐用年数（自主基準）：指定された保守点検を実施した場合に 8 年。
- ただしネジなどの消耗部品は除く。
- 交換部品：保守部品の保有年数は、製造終了後 3 年

【 保 守 ・ 点 検 に 係 る 事 項 】

- 1)本製品は、年 1 回のメンテナンスが必要です。定期点検を当社又は取扱店に依頼して下さい。
- 2)使用者による保守点検事項

項目	点検頻度	点検内容（概要）
全体	毎回	キズ・摩耗なきこと
全体	毎回	汚れなきこと

3) 業者による保守点検事項

項目	点検頻度	点検内容（概要）
定期点検事項	毎年	定期点検表の各項目
全体	毎回	汚れなきこと

【 包 装 】 1 台単位

【 製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称及び住所 】

製造販売業者：株式会社コンデックス

〒343-0823 埼玉県越谷市相模町 1-331-7

TEL048-990-3333 FAX048-990-3334

製造業者：株式会社コンデックス 会津工場