

類別：機械器具 手術台及び治療台

一般医療機器 一般名称：手術台アクセサリー、JMDNコード：70469000

昇降式メーヨ台

【 警告 】

- ・間違った患者のポジショニングにより生命機能が害される場合がある。
- 正しく患者の位置を決めて、継続的な観察を維持すること。

【 禁忌・禁止 】


- ・本製品は当社が認めた者以外、修理・保守点検できない。
- 当社製品以外のアクセサリーは使用しないこと。

【 形状・構造及び原理 】

1)構成

- (1)本体
- (2)トレイ
- (3)ハンドル
- (4)絶縁キャスター

2) 各部の名称

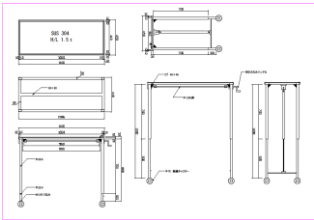

3) 寸法及び質量

- 本体 (mm) 幅：1100 横：450 高さ：800～1200 質量 (k g) 14.0±1.0
- トレイ (mm) 幅：1100 横：450 厚み：32 質量 (k g) 4.5±0.5
- ハンドル (mm) 125×70 質量 (g) 250
- 絶縁キャスター φ70 質量 (g) 700

4) 原理

昇降式メーヨ台はキャスターが付いており、手術エリアの術者が要求する範囲までに近づき、トレイに乗せた手術器具を術者に提供するものである。

【 使用目的、効果、効能 】

昇降式メーヨ台は上部トレイ部に手術用器具を乗せ、術者の手の位置の高さに可変させ、術者が最適なポジションにて使用できることを目的とした手術台アクセサリーである。

【 品目仕様 】

1) 寸法及び質量

- 本体 寸法 (mm) 幅：1100 横：450 高さ：800～1200 質量 (k g) 14.0±1.0
- トレイ 寸法 (mm) 幅：1100 横：450 厚み：32 質量 (k g) 4.5±0.5
- ハンドル 寸法 (mm) 125×70 質量 (g) 250
- 絶縁キャスター 寸法φ70 質量 (g) 700

2) 昇降式メーヨ台の耐荷重 最大 50 k g

【 操作方法又は使用方法 】

使用環境状況

- 温度 常温
- 湿度 常湿

設置上の注意

トレイ上から手術器具が脱落しないことを確認し、キャスターを固定すること

【 使用方法 】

- 1) トレイの上に覆布をかぶせ、その上に滅菌済み手術器具を乗せる。
- 2) 手術エリアにアプローチし、術者の要求する位置と高さにセットする。
- 3) 術者は手術器具を展開し、手術に入る。

使用上の注意

- 1) 禁忌・休止
 - ・摩擦またはダメージがある場合、しっかりと固定できない。
 - ・完全な状態の製品を使用すること。
- 2) その他
 - ・本アクセサリーを廃棄する場合は産業廃棄物となり、必ず地方自治体の条例・規則に従い、許可を得た産業廃棄物処分業者に廃棄を依頼すること。

【 貯蔵方法及び使用期間 】

貯蔵方法：本製品は、清浄にして保管すること。

使用耐用年数（自主基準）：指定された保守点検を実施した場合に 5 年。

ただしネジなどの消耗部品は除く。

交換部品：保守部品の保有年数は、製造終了後 3 年

【 保守・点検に係る事項 】

- 1)本製品は、年 1 回のメンテナンスが必要です。定期点検を当社又は取扱店に依頼して下さい。
- 2) 使用者による保守点検事項

項目	点検頻度	点検内容（概要）
全体	毎回	キズ・摩耗なきこと
全体	毎回	汚れなきこと

3) 業者による保守点検事項

項目	点検頻度	点検内容（概要）
定期点検事項	毎年	定期点検表の各項目
全体	毎回	汚れなきこと

【 包装 】

1 台単位

【 製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称及び住所 】

製造販売業者：株式会社コンデックス 〒343-0823 埼玉県越谷市相模町1-331-7

TEL048-990-3333 FAX048-990-3334

製造業者：株式会社コンデックス 会津工場