

類別：機械器具 手術台及び治療台

一般医療機器 一般名称：手術台アクセサリ、JMDNコード：70469000

側臥位用足受台

〔 警告 〕

患者の任意の体位を確保するために手術台アクセサリで支持するときは常に患者の状態を監視する事。


(長時間の体位は神経麻痺や褥瘡の原因となります)

〔 禁忌・禁止 〕

他社手術台では使用しない事。

本製品は当社が認めた者以外、修理、保守点検が出来ない。

〔 操作方法又は使用方法 〕

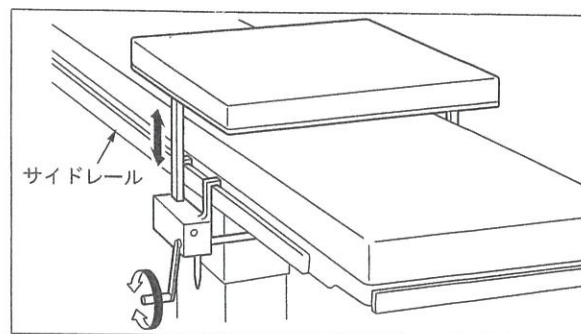

1. 手術台のサイドレールに取り付けます。
2. ハンドルを回して脚板昇降を操作します。

脚板最大昇降量：270mm

【使用上の注意】

*1. 警告


締結部の固定は必ず確認してください。ゆるんだ状態では機器が外れたり、動いたりして患者に障害が起きるおそれがあります。

2. 重要な基本的注意

手術台を作動するときには他のアクセサリやテーブルトップとの接触・干渉に注意して下さい。

〔 形状・構造及び原理 〕

1) 外観図

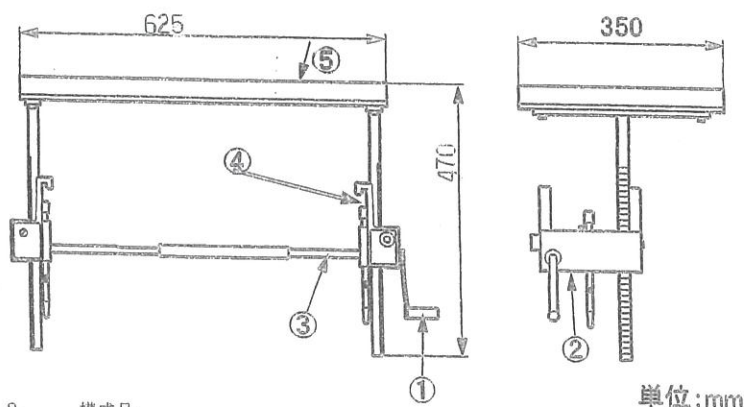

単位:mm

2、 構成品

- ① ハンドル
- ② ギヤケース
- ③ 連結軸
- ④ 固定金具
- ⑤ 足受台

3、 原理

ハンドルを回転させるとギヤケース内のギヤが回転を伝達され連結棒を伝わり反対側のギヤボックス内のギヤも回転される。両方のギヤボックス内にはラックが噛合っていてラックの上部には足受台が固定されている。ラックがハンドルの回転に合わせて昇降すると足受台も同じように昇降する構造となっている。固定金具は手術台サイドレールに本側臥位用足受台を固定する為のものである。

〔 使用目的、効果、効能 〕

手術台に付属するアクセサリ。側臥位手術体位時に下肢の片側を保持するために使用する。

〔 貯蔵方法及び使用期間 〕

貯蔵方法：本製品は、清浄にして保管すること。

使用耐用年数（自主基準）：指定された保守点検を実施した場合に7年。ただしネジなどの消耗部品は除く。

〔 保守・点検に係る事項 〕

- 1) 本製品は、年 1 回のメンテナンスが必要です。定期点検を当社又は取扱店に依頼して下さい。
- 2) 使用前、使用後に破損箇所が無いことを確認してください。
- 3) 清掃・消毒は血液・薬剤・汚染等の汚れは消毒水でふき取り更に消毒用アルコール等で 拭拭して下さい。

〔 製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称及び住所 〕

製造販売業者：株式会社コンデックス

〒343-0823 埼玉県越谷市相模町1-331-7

TEL 048-990-3333 FAX 048-990-3334

製造業者：株式会社コンデックス 会津工場

〔 保証期間に係る事項 〕

本品は納品後1年間を保証期間として無償修理いたします。但し第三者が修理した場合、天災による破損、不適切な使用あるいは故意による破損は除きます。その他保証は弊社規定に準じます。