

類別:機械器具 手術台及び治療台

一般医療機器 一般名称:手術台アクセサリ、JMDNコード:70469000

側臥位上肢台

【 警告 】


1. 患者の任意の体位を確保するためにアクセサリで支持する時は常に患者の状態を監視する事。
(長時間の体位は神経麻痺の原因となることがあります)
2. 側臥位での使用は下側になる腕を上肢台に固定する事。
(宙にさらした状態では患者に障害が起きる事があります)

【 禁忌・禁止 】

他社手術台では使用しない事。

本製品は、当社が認めた者以外、修理・保守点検できない

【 形状・構造及び原理 】

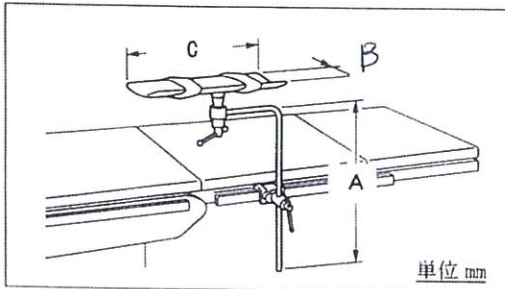

A 500±10 B 140±10 C 430±10

材質

① 本体

上肢台:鋼板、発泡ウレタン

支柱:ステンレス鋼棒

固定バンド:ナイロン樹脂

② 固定金具


ステンレス鋳鋼品

【使用目的又は効果】

手術台に付属するアクセサリ

開胸手術等での側臥位のポジションで患者の上部になる手腕を支持するための器具。

* 【使用方法等】

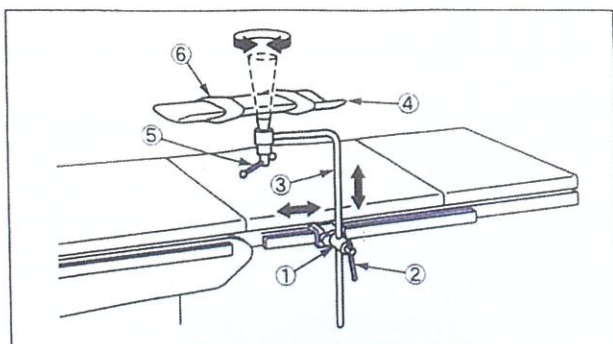

① レール固定金具 ④上肢台

② 固定ハンドル ⑤上肢台固定ハンドル

③ 支柱 ⑥固定バンド

1. 手術台のサイドレールにレール固定金具①を取り付ける
2. 支柱③をレール固定金具①に差し込み、固定ハンドル②を締めて仮止めする
3. 患者の体位に合わせて支柱③を動かして位置を調整する。
4. 調整後、固定ハンドル②を回して固定金具①及び支柱③を固定する。
5. 上肢台固定ハンドル⑤を緩めて上肢台④の角度を調整する。
6. 調整後、上肢台固定ハンドル⑤を締めて上肢台④を固定する。
7. 患者の腕を固定バンド⑥で固定する。

【 使用上の注意 】

重要な基本的注意

- ①衛生の為患者が本製品に触れる部分には必ず滅菌済みドレープを使用する事
- ②手術台を作動する時は他の手術台アクセサリやテーブルトップとの接触干渉に気を付ける事

1) 禁忌・禁止

- ・摩擦またはダメージがある場合、しっかりと固定できない
- ・完全な状態の製品を使用する事

2) その他

- ・本アクセサリを廃棄する場合は産業廃棄物となり、必ず地方自治体の条例・規則に従い許可を得た産業廃棄物処分業者に廃棄を依頼すること。

【 貯蔵法及び使用期間 】

貯蔵方法:本製品は、清浄にして保管すること。

使用耐年数(自主基準):指定された保守点検を実施した場合に7年。

但しネジなどの消耗品は除く。

【 保守・点検に係る事項 】

- 1) 本製品は、年1回のメンテナンスが必要です。定期点検を当社又は取扱店に依頼してください
- 2) 使用前、使用後に破損箇所が無い事を確認してください。
- 3) 清掃・消毒は血液・薬剤・汚染等の汚れは消毒水で拭き取り更に
- 4) 消毒用アルコール等で清拭してください。

【 製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称及び住所 】

製造販売業者:株式会社 コンデックス

〒343-0823 埼玉県越谷市相模町 1-331-7

TEL: 048-990-3333 FAX:048-990-3334

製造業者:株式会社 コンデックス 会津工場

【 保証期間に係る事項 】

本品は納品後1年間を保証期間として無償修理致します。

但し第三者が修理した場合、天災による破損、不適切な使用、あるいは故意による破損は除きます。その他保証条件は弊社規定に準じます。