

類別:機械器具 手術台及び治療台

一般医療機器 一般名称:手術台アクセサリ、JMDNコード:70469000

手首固定器


【 警告 】

1. 患者の任意の体位を確保するためのアクセサリで支持する時は常に患者の状態を監視する事。
(長時間の体位は神経麻痺の原因となることがあります)
2. 固定する上肢部に過大な荷重をかけると鬱血等の障害が
です。抑制帯と腕の間に余裕をもって使用すること。

【 禁忌・禁止 】

他社手術台では使用しない事。
本製品は、当社が認めた者以外、修理・保守点検できない

【 形状・構造及び原理 】

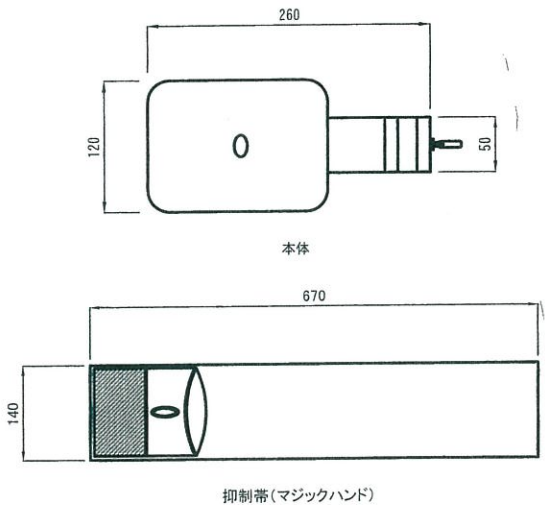

本体
幅 120±10 奥行 30±5 高さ 260±10
抑制帯
幅 140±5 横 30±5 高さ 670±10
材質
本体:SUS304
抑制帯:ポリエステル、綿

【使用目的又は効果】
手術台に付属するアクセサリ
患者の上肢部を任意の位置で固定するために用いる器具

【 操作方法又は使用方法 】

- 1) 本手首固定器を手術台サイドレールに取り付ける。
- 2) 患者の上肢を本手首固定器の抑制帯で固定する。
- 3) 患者の上肢に無理な力が加わっていないか抑制帯の張りを調整しながら確認
- 4) 本手首固定器が手術台サイドレールにしっかり固定されている事を確認する。
- 5) 手術終了後に本手首固定器を手術台サイドレールから取り外す。
- 6) 本手首固定器の抑制帯及び本体を消毒液にて清浄し保管する。
抑制帯の汚れが多いときは本体から外して清掃する。

【 使用上の注意 】

重要な基本的注意

- ①本体が手術台サイドレールに確実にしっかりと固定されている事が使用上の条件
- ②抑制帯は、本体に袋状に被せてボタンで止め、脱落しない事を必ず確認し使用する事が条件
- ③抑制帯を上腕に巻き付け余長部をマジックテープにてしっかりと固定されている事が使用上の条件。

1) 禁忌・禁止

- ・摩擦またはダメージがある場合、しっかりと固定できない
- ・完全な状態の製品を使用する事

2) その他

- ・本アクセサリを廃棄する場合は産業廃棄物となり、必ず地方自治体の
条例・規則に従い許可を得た産業廃棄物処分業者に廃棄を依頼すること。

【 貯蔵法及び使用期間 】

貯蔵方法: 本製品は、清浄にして保管すること。
使用耐年数(自主基準): 指定された保守点検を実施した場合に 7 年。
但しネジなどの消耗品は除く。

【 保守・点検に係る事項 】

本製品は、年 1 回のメンテナンスが必要です。定期点検を当社又は取扱店に依頼

- 1) 使用前、使用後に破損箇所が無い事を確認してください。
- 2) 清掃・消毒は血液・薬剤・汚染等の汚れは消毒水で拭き取り更に
- 3) 消毒用アルコール等で清拭してください。

【 製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称及び住所 】

製造販売業者: 株式会社 コンデックス テクニカルセンター
〒343-0823 埼玉県越谷市相模町 3-229-1
TEL: 048-961-8106 FAX: 048-961-8108
製造業者: 株式会社 コンデックス 会津工場

【 保証期間に係る事項 】

本品は納品後 1 年間を保証期間として無償修理致します。
但し第三者が修理した場合、天災による破損、不適切な使用、あるいは故意によ
る破損は除きます。その他保証条件は弊社規定に準じます。