

類別:機械器具 手術台及び治療台

一般医療機器 一般名称:手術台アクセサリ、JMDNコード:70469000

頭部固定金具

【 警告 】


1. 患者頭部に施術する為の手術用器具を固定する為のアクセサリで支持する時は、常に患者の状態を監視する事。
2. 固定する頭部に過大な荷重をかけると鬱血等の障害が出ます。

【 禁忌・禁止 】

他社手術台では使用しない事。
本製品は、当社が認めた者以外、修理・保守点検できない

【 形状・構造及び原理 】

本体

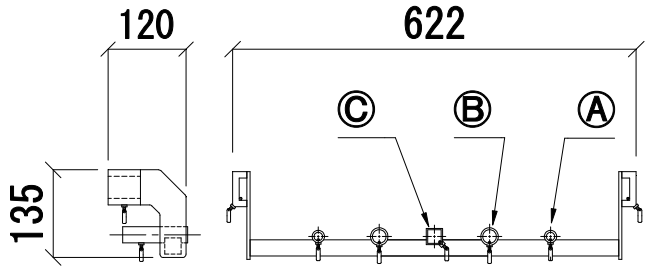

寸法(mm) : 幅 620±10 奥行 120±10 高さ 135±10

重量(kg) : 7.0±0.5

材質 : ステンレス SUS304

原理 : 本体クランプ部を手術台サイドレールに差し込む。
クランプ部の下側に付いている固定ネジで本体を固定する。
手術に使用する他の器具を適合する筒に、所定の位置まで差し込み、
固定ネジで他の器具を固定する。

【使用目的又は効果】

手術台に付属するアクセサリ
手術台本体サイドレールに取付、患者頭部の手術に関する手術器具を固定する
為の手術台アクセサリである。

【 操作方法又は使用方法 】

- 1) 手術台の患者頭側左右サイドレールに本品頭部固定器クランプを差し込む。
- 2) 手術台サイドレールがクランプ部の端部にくるまで左右同じ長さに差し込む。
- 3) クランプ下側に付いている固定ネジを締め付け、固定する。
- 4) 確実に固定されたかを確認する為に、本体を上・下に動かす。
- 5) 頭部固定器の筒に他の必要とされているアクセサリを取り付けて固定する。
- 6) 使用完了時は他の器具を取外してから、本品クランプ部固定ネジを緩めて手術台より取り外す。
- 7) 本品は消毒液にて清浄し保管する。

【 使用上の注意 】

重要な基本的注意

- ① 本体が手術台サイドレールに確実にしっかりと固定されている事が使用上の条件
- ② 本体を上・下に動かしてガタ付き、緩みが無い事を必ず確認する
- ③ 他の器具を固定したらガタ付き、緩みが無い事を必ず確認する
- ④ 亀裂、摩耗が無い事を確認する事が使用上の条件。

1) 禁忌・禁止

- ・摩耗またはダメージがある場合、しっかりと固定できない
- ・完全な状態の製品を使用する事

2) その他

- ・本アクセサリを廃棄する場合は産業廃棄物となり、必ず地方自治体の
条例・規則に従い許可を得た産業廃棄物処分業者に廃棄を依頼すること。

【 貯蔵法及び使用期間 】

貯蔵方法: 本製品は、清浄にして保管すること。

使用耐年数(自主基準): 指定された保守点検を実施した場合に 7 年。
但しネジなどの消耗品は除く。

【 保守・点検に係る事項 】

本製品は、年 1 回のメンテナンスが必要です。定期点検を当社又は取扱店に依頼

- 1) 使用前、使用後に破損箇所が無い事を確認してください。
- 2) 清掃・消毒は血液・薬剤・汚染等の汚れは消毒水で拭き取り更に
- 3) 消毒用アルコール等で清拭してください。

【 製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称及び住所 】

製造販売業者: 株式会社 コンデックス テクニカルセンター
〒343-0823 埼玉県越谷市相模町 3-229-1

TEL: 048-961-8106 FAX: 048-961-8108

製造業者: 株式会社 コンデックス 会津工場

【 保証期間に係る事項 】

本品は納品後 1 年間を保証期間として無償修理致します。
但し第三者が修理した場合、天災による破損、不適切な使用、あるいは故意によ
る破損は除きます。その他保証条件は弊社規定に準じます。