

類別:機械器具 手術台及び治療台

一般医療機器 一般名称:手術台アクセサリ、JMDNコード:70469000

X線カセットホルダー


【 警告 】

1. 患者のX線撮影を行う為のアクセサリで手術台天板は、フラットの状態を保持しなければならない。
2. 撮影終了後は速やかに X 線カセットホルダーを手術台より取り外す事。

【 禁忌・禁止 】

他社手術台では使用しない事。
本製品は、当社が認めた者以外、修理・保守点検できない

【 形状・構造及び原理 】

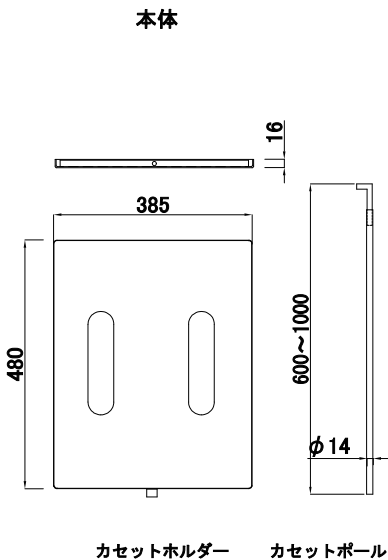

寸法(mm) : 幅 385±10 奥行 480±10 高さ 16±5

重量(kg) : 5.0±0.5

材質 : ステンレス SUS304

原理 : カセットホルダー部にX線カセットを載せて手術台天板部の間に挿入。
患者のX線撮影する任意の位置にカセットポールにて移動させセット。

【使用目的又は効果】

手術台に付属するアクセサリ

患者と手術台天板部の任意の位置にセットしX線撮影を行う為の手術台アクセサリである。

【 操作方法又は使用方法 】

- 1)カセットホルダー部にX線カセットを載せてセットする。
- 2)手術台天板部にカセットホルダーを滑り込ませ、任意の位置になるようにカセットポールを使ってセットする。
- 3)X線撮影終了後は、カセットホルダーを引き抜きX線カセットを回収する。
- 4)カセットホルダーとカセットポールはセットして保管する。
- 7)本品は消毒液にて清浄し保管する。

【 使用上の注意 】

- ①カセットホルダー部にX線カセットを載せる時は両手で確実に保持する事。
- ②手術台天板部に挿入する時は左右のクリアランスを同じにする。
手術台のフックに確実に載せて落下しないようにセットする事が条件。
- ③X線カセットホルダーが手術台にセットされている時は手術台天板部を操作してはいけない。
- ④X 線撮影終了後は、速やかにカセットホルダーを取り外す事。
- ⑤亀裂、摩耗が無い事を確認し使用する事が条件。

1) 禁忌・禁止

- ・摩耗またはダメージがある場合、しっかりと固定できない
- ・完全な状態の製品を使用する事

2) その他

- ・本アクセサリを廃棄する場合は産業廃棄物となり、必ず地方自治体の条例・規則に従い許可を得た産業廃棄物処分業者に廃棄を依頼すること。

【 貯蔵法及び使用期間 】

貯蔵方法:本製品は、清浄にして保管すること。

使用耐年数(自主基準): 指定された保守点検を実施した場合に 7 年。
但しネジなどの消耗品は除く。

【 保守・点検に係る事項 】

本製品は、年 1 回のメンテナンスが必要です。定期点検を当社又は取扱店に依頼

- 1) 使用前、使用後に破損箇所が無い事を確認してください。
- 2) 清掃・消毒は血液・薬剤・汚染等の汚れは消毒水で拭き取り更に
- 3) 消毒用アルコール等で清拭してください。

【 製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称及び住所 】

製造販売業者:株式会社 コンデックス テクニカルセンター

〒343-0823 埼玉県越谷市相模町 3-229-1

TEL: 048-961-8106 FAX:048-961-8108

製造業者:株式会社 コンデックス 会津工場

【 保証期間に係る事項 】

本品は納品後 1 年間を保証期間として無償修理致します。

但し第三者が修理した場合、天災による破損、不適切な使用、あるいは故意による破損は除きます。その他保証条件は弊社規定に準じます。