

類別:機械器具 手術台及び治療台

一般医療機器 一般名称:手術台アクセサリ、JMDNコード:70469000

延長サイドレール

【 警告 】


1. 手術台サイドレールを補足する為のアクセサリで必ず適合したサイドレールに取り付けなければならない。
2. 取り付け時に無理に押し込んだり、強引に取り付けて本延長サイドレールがダメージを受けるような取り付けをしてはならない。

【 禁忌・禁止 】

他社手術台では使用しない事。

本製品は、当社が認めた者以外、修理・保守点検できない

【 形状・構造及び原理 】

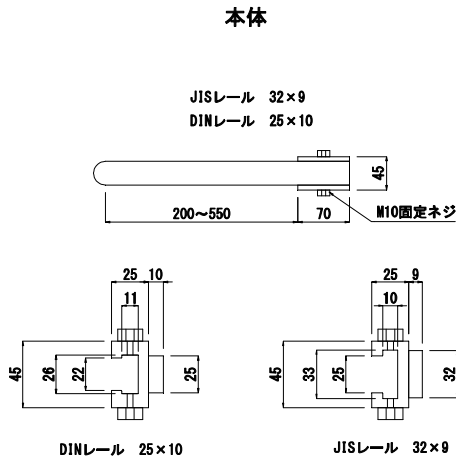

寸法(mm) : 200~550

重量(kg) : 3.0~10.0

材質 : ステンレス SUS304

原理 : 本品を手術台レールの端部よりに差し込み任意の位置に移動させる。
所定の位置にてクランプ部固定ネジを締め付けて本品を固定する。

【使用目的又は効果】

手術台に付属するアクセサリ

手術台レールに取付しレールを延長する為に設ける手術台アクセサリである。

【 操作方法又は使用方法 】

- 1) 予め手術台のどちら側に取り付けるか確認する。
- 2) 手術台レールの端部よりクランプ先端を差し込み、所定の位置まで移動する。
- 3) クランプの下側に固定ネジをセットして締め付け、本品延長サイドレールを固定する。
- 4) 本品延長サイドレールを上・下に動かして確実に固定されている事を確認する。
- 5) 使用後はクランプ部固定ネジを緩めてを手術台より取り外す。
- 6) 本品延長サイドレールは消毒液にて清浄し保管する。

【 使用上の注意 】

- ① 手術台サイドレールに確実にしっかりと固定されている事が使用上の条件。
- ② 延長サイドレールを、上・下に動かしてガタ付き及び緩みが無い事を必ず確認する。
- ③ 亀裂、摩耗が無い事を確認して使用する事が条件。

1) 禁忌・禁止

- ・摩耗またはダメージがある場合、しっかりと固定できない
- ・完全な状態の製品を使用する事

2) その他

- ・本アクセサリを廃棄する場合は産業廃棄物となり、必ず地方自治体の条例・規則に従い許可を得た産業廃棄物処分業者に廃棄を依頼すること。

【 貯蔵法及び使用期間 】

貯蔵方法: 本製品は、清浄にして保管すること。

使用耐年数(自主基準): 指定された保守点検を実施した場合に 7 年。

但しネジなどの消耗品は除く。

【 保守・点検に係る事項 】

本製品は、年 1 回のメンテナンスが必要です。定期点検を当社又は取扱店に依頼

- 1) 使用前、使用後に破損箇所が無い事を確認してください。
- 2) 清掃・消毒は血液・薬剤・汚染等の汚れは消毒水で拭き取り更に
- 3) 消毒用アルコール等で清拭してください。

【 製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称及び住所 】

製造販売業者: 株式会社 コンデックス テクニカルセンター

〒343-0823 埼玉県越谷市相模町 3-229-1

TEL: 048-961-8106 FAX: 048-961-8108

製造業者: 株式会社 コンデックス 会津工場

【 保証期間に係る事項 】

本品は納品後 1 年間を保証期間として無償修理致します。

但し第三者が修理した場合、天災による破損、不適切な使用、あるいは故意による破損は除きます。その他保証条件は弊社規定に準じます。