

類別:機械器具 手術台及び治療台

一般医療機器 一般名称:手術台アクセサリ、JMDNコード:70469000

牽引延長バー

【 警告 】

1. 患者の足牽引を確保する為のアクセサリで
支持する時は常に患者の状態を監視する事。
(長時間の体位は神経麻痺の原因となることがあります)
2. 固定する牽引靴に過大な荷重をかけると鬱血等の障害が
出ます。


【 禁忌・禁止 】

他社手術台では使用しない事。

本製品は、当社が認めた者以外、修理・保守点検できない

【 形状・構造及び原理 】

本体

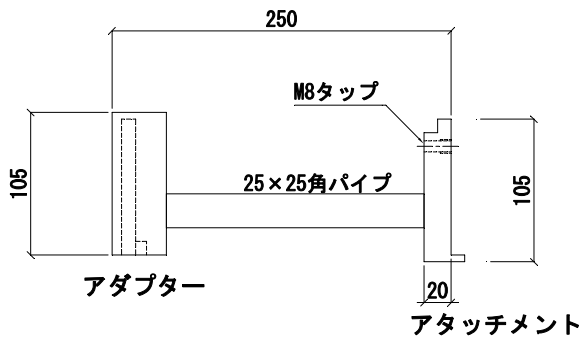

牽引延長バー 1001.11CD

寸法(mm) : 幅 250±10 奥行 35±5 高さ 105±10

重量(kg) : 5.0±0.5

材質 : ステンレス SUS304

原理 : 本牽引延長バーは、本体牽引装置にアダプター側を取り付ける。

アタッチメント側に牽引靴を取り付けて牽引装置の長さを
調整する為に使用される事を原理とする。

【使用目的又は効果】

手術台に付属するアクセサリ

本牽引延長バーは足牽引装置の長さを補足する為に取り付ける
手術台アクセサリである。

【 操作方法又は使用方法 】

- 1) 本体牽引装置に牽引延長バーのアダプター側を差し込み、固定する。
- 2) 手術台上の患者患足側牽引靴を牽引延長バー アタッチメント側に装着する。
- 3) 患足側角度及び捻転を調整し、各部固定ネジを固定する。
- 4) 患者患足部に異常なストレスが無い事を確認する。
- 5) 手術終了後は、取付手順と反対の取外し手順にて取り外す。
- 6) 本品牽引延長バーは、消毒液にて洗浄し保管する。

【 使用上の注意 】

- ① アダプター側を本体牽引装置に装着し固定ネジで固定する。
- ② アタッチメント側に牽引靴ベースを差し込み、固定ネジで固定する。
- ③ 各部のガタ付き・緩みが無い事を確認するのが条件。
- ④ 亀裂、摩耗が無い事を確認し使用する事が条件。

1) 禁忌・禁止

- ・摩耗またはダメージがある場合、しっかりと固定できない
- ・完全な状態の製品を使用する事

2) その他

- ・本アクセサリを廃棄する場合は産業廃棄物となり、必ず地方自治体の
条例・規則に従い許可を得た産業廃棄物処分業者に廃棄を依頼すること。

【 貯蔵法及び使用期間 】

貯蔵方法: 本製品は、清浄にして保管すること。

使用耐年数(自主基準): 指定された保守点検を実施した場合に 7 年。
但しネジなどの消耗品は除く。

【 保守・点検に係る事項 】

本製品は、年 1 回のメンテナンスが必要です。定期点検を当社又は取扱店に依頼

- 1) 使用前、使用後に破損箇所が無い事を確認してください。
- 2) 清掃・消毒は血液・薬剤・汚染等の汚れは消毒水で拭き取り更に
- 3) 消毒用アルコール等で清拭してください。

【 製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称及び住所 】

製造販売業者: 株式会社 コンデックス テクニカルセンター

〒343-0823 埼玉県越谷市相模町 3-229-1

TEL: 048-961-8106 FAX: 048-961-8108

製造業者: 株式会社 コンデックス 会津工場

【 保証期間に係る事項 】

本品は納品後 1 年間を保証期間として無償修理致します。

但し第三者が修理した場合、天災による破損、不適切な使用、あるいは故意によ
る破損は除きます。その他保証条件は弊社規定に準じます。