

類別:機械器具 手術台及び治療台

一般医療機器 一般名称:手術台アクセサリ、JMDNコード:70469000

X線カセット枠

【 警告 】


1. 患者のX線撮影を行う為のアクセサリで手術台天板は、フラットの状態を保持しなければならない。
2. 撮影終了後は速やかに X 線カセットを手術台から取り外す事。

【 禁忌・禁止 】

他社手術台では使用しない事。
本製品は、当社が認めた者以外、修理・保守点検できない

【 形状・構造及び原理 】

本体

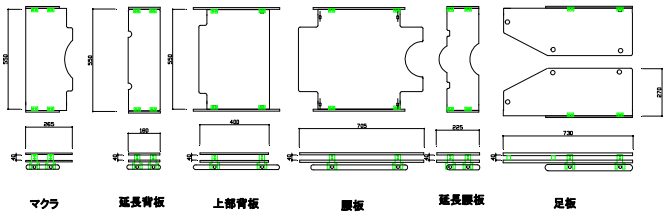

バクスター7000 テーブルトップX線カセット嵩上げ

寸法・質量

部品	幅 (mm±10)	奥行 (mm±10)	質量 (kg±0.2)
マクラ	550	265	3.0
延長背板	550	180	2.5
上部背板	550	400	4.0
腰板	550	705	6.5
延長腰板	550	225	2.8
足板	780	270	3.6

原理 : 本品X線カセット枠ベークライトを手術台上の適合箇所に振り分ける。
手術台サイドレールに各ベークライトのフックをしっかりとめ込み固定する。

【使用目的又は効果】

X線カセット枠は手術台テーブルトップを2段構造としてX線カセットを手術台上の任意の位置に置いて患者のX線撮影を行う事を目的とした手術台アクセサリである。

【 操作方法又は使用方法 】

- 1)手術台テーブルトップを水平位置に調整する。
- 2)手術台テーブルトップのパッドを取り外す。
- 3)各テーブルトップにX線カセット枠の本体を合わせる。
- 4)手術台サイドレールに X 線カセット枠のフックを確実にめ込む。
- 5)上下左右のガタ付き・緩みが無い事を確認する。
- 6)X 線カセット枠にパッドを取り付ける。
- 7)手術台上に患者を乗せる。
- 8)手術台頭側から X 線カセットを差し込んで患者撮影位置までスライドさせる。
- 9)患者のX線撮影が終了したら患者を移動させる。
- 10)手術台テーブルトップ上から X 線カセット枠を取り外す。
- 11)本品は清浄にして、保管する。

【 使用上の注意 】

- 1、本品X線カセット枠は手術台テーブルトップが水平状態にて使用する事が条件。
- 2、X 線カセット枠のフックが手術台サイドレールにしっかりとまっている事を確認
- 3、亀裂、摩耗が無い事を確認し使用する事が条件。
- 1)禁忌・禁止
 - ・摩耗またはダメージがある場合、しっかりと固定できない
 - ・完全な状態の製品を使用する事
- 2)その他
 - ・本アクセサリを廃棄する場合は産業廃棄物となり、必ず地方自治体の条例・規則に従い許可を得た産業廃棄物処分業者に廃棄を依頼すること。

【 貯蔵法及び使用期間 】

貯蔵方法:本製品は、清浄にして保管すること。
使用耐年数(自主基準):指定された保守点検を実施した場合に7年。
但しネジなどの消耗品は除く。

【 保守・点検に係る事項 】

本製品は、年1回のメンテナンスが必要です。定期点検を当社又は取扱店に依頼

- 1) 使用前、使用後に破損箇所が無い事を確認してください。
- 2) 清掃・消毒は血液・薬剤・汚染等の汚れは消毒水で拭き取り更に
- 3) 消毒用アルコール等で清拭してください。

【 製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称及び住所 】

製造販売業者:株式会社 コンデックス テクニカルセンター
〒343-0823 埼玉県越谷市相模町3-229-1
TEL: 048-961-8106 FAX:048-961-8108

製造業者:株式会社 コンデックス 会津工場

【 保証期間に係る事項 】

本品は納品後1年間を保証期間として無償修理致します。
但し第三者が修理した場合、天災による破損、不適切な使用、あるいは故意による破損は除きます。その他保証条件は弊社規定に準じます。