

類別：機械器具 手術台及び治療台

一般医療機器 一般名称：手術台アクセサリ、JMDNコード：70469000

ハンドトラウマテーブル

【 警告 】

患者の任意の体位を確保するための手術台アクセサリで
支持するときは常に患者の状態を監視する事。

（長時間の体位は神経麻痺や褥瘡の原因となります）


【 禁忌・禁止 】

他社手術台では使用しない事。

本製品は当社が認めた者以外、修理、保守点検出来ない。

【 形状・構造及び原理 】

1)外観図

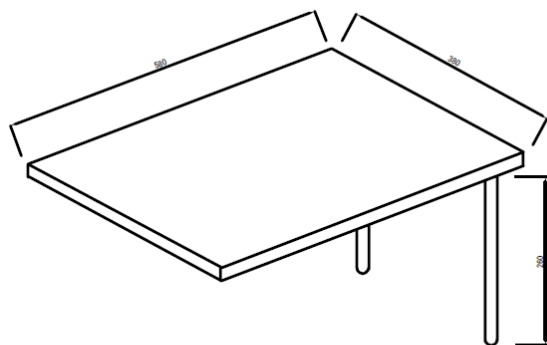

寸法：幅580 横380 高さ 260

ハンドトラウマテーブル外観図

2) 本体 SUS304、フェノール樹脂

3) パッド 合成皮革

【 操作方法又は使用方法 】

- 1) 本ハンドトラウマテーブルを手術台サイドレールクランプに差し込み、取り付ける。
- 2) 仰臥体位になっている患者上肢を介助しハンドトラウマテーブルに載せる
- 3) 患者上肢とハンドトラウマテーブルの高さを合わせてクランプを固定する。
- 4) 使用完了時は患者上肢を介助し上に持ち上げる。
- 5) ハンドトラウマテーブルを固定しているクランプをゆるめて取り外す。
- 6) 本ハンドトラウマテーブルのパッド及び本体部表面を消毒液にて清浄し保管する。

【 貯蔵方法及び使用期間 】

貯蔵方法：本製品は、清浄にして保管すること。

使用耐用年数（自主基準）：指定された保守点検を実施した場合に7年。

ただしネジなどの消耗部品は除く。

【 保守・点検に係る事項 】

- 1) 本製品は、年1回のメンテナンスが必要です。定期点検を当社又は取扱店に依頼して下さい。
- 2) 使用前、使用後に破損個所が無いことを確認してください。
- 3) 清掃・消毒は血液・薬剤・汚染等の汚れは消毒水でふき取り更に消毒用アルコール等で清拭して下さい。

【 使用目的、効果、効能 】

手術台に付属するアクセサリ。手指の外科用手術台。患者の手指を載せて手術を行う手台である。

【 製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称及び住所 】

製造販売業者：株式会社コンデックス

〒343-0823 埼玉県越谷市相模町1-331-7

TEL048-990-3333 FAX048-990-3334

製造業者：株式会社コンデックス 会津工場

【 保証期間に係る事項 】

本品は納品後1年間を保証期間として無償修理いたします。

但し第三者が修理した場合、天災による破損、不適切な使用、

あるいは故意による破損は除きます。

その他保証条件は弊社規定に準じます。