

** 2025年8月改訂（第3版）（有効期間延長に基づく改訂）

* 2017年4月改訂（第2版）

品目番号 12B1X10009000007

医療用品（4） 整形用品
一般医療機器 医療用不織布
JMDNコード 34655000

再使用禁止

ナースバン

【禁忌・禁止】

再使用禁止

* **【形状・構造及び原理等】**

アルミ蒸着ポリエステルガーゼ、レーヨン

* **【使用目的又は効果】**

創傷又は外科切開部を処置するために用いる。

* **【使用方法等】**

アルミ蒸着面を傷口に当てて、包帯・絆創膏などで固定すること。

【使用上の注意】

- ・本品の使用により、発疹・発赤・かゆみ等の症状があらわれた場合は、使用を中止し医師又は薬剤師に相談すること。
- ・パッド部分が濡れたり汚れたりしたときは、新しいものに取り替えること。
- ・滅菌してあるので開封後はすみやかに使用すること。
- ・開封・破損・汚染等が見られる場合は滅菌品として使用しないこと。

** **【保管方法及び有効期間等】**

- ・保管方法：直射日光を避け、湿気が少なく、乳幼児の手の届かない場所に保管すること。
- ・有効期間：製造後 5年（当社データによる）。

【発売元】

株式会社 サンプラネット

〒112-0012 東京都文京区大塚 3-5-10 電話番号：03-5978-1953

* **【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】**

光洋産業株式会社

電話番号：0479-86-4141