

医療用品（O4）整形用品
一般医療機器 手術用被覆・保護材 JMDNコード：34654000
一般医療機器 救急絆創膏 JMDNコード：34864000

アクアセル サージカル

再使用禁止

【警告】

明らかな臨床的創感染を有する患者には慎重に使用すること。
[感染を悪化させるおそれがある。臨床的創感染を有する患者
であっても感染に対する薬剤治療や全身・局所管理をしながら
創傷被覆・保護材を併用することが有益と医師が判断する
場合には、局所の観察を十分に行い、慎重に使用すること。]

* 【禁忌・禁止】

再使用禁止
体内への挿入、埋め込み又は留置をしないこと。

【形状・構造及び原理等】

1. 形状及び構造

本品はシートタイプで、防水性外層、吸収性パッド及びフィルム、粘着層から成る。

名 称	原材料名
防水性外層	ポリウレタンフィルム ゼラチン、ペクチン、カルボキシメチルセルロース ナトリウム、ポリイソブチレン、スチレン・イ ソプレン・スチレンブロック共重合体、流動パラ フィン、ロジンエステル等
吸収性パッド	カルボキシメチルセルロースナトリウム、ナイロ ン糸、ポリウレタン糸
フィルム	ポリウレタンフィルム
粘着層	ゼラチン、ペクチン、カルボキシメチルセルロース ナトリウム、ポリイソブチレン、スチレン・イ ソプレン・スチレンブロック共重合体、流動パラ フィン、ロジンエステル等
剥離紙	シリコーンコート紙 シリコーンコートポリエステルフィルム

2. 機能及び動作原理

本品は、創部を被覆、保護し、過剰な滲出液が生じる場合は
吸収性パッドにより吸収させる。

【使用目的又は効果】

術後創傷、創傷のために用いる適切なサイズの被覆・保護材である。

* 【使用方法等】

- 1) 本品を貼付する前に、創部を適切に洗浄し生理食塩液等でよく
すすぎ、周囲の皮膚を乾燥させる。
- 2) 吸収性パッドが創部と直接接する大きさの本品を選ぶ。本品
の粘着層が創部に接触しないこと。
- 3) 本品の長軸方向に剥離紙を4分の3まで剥がす。このとき吸収性
パッドと粘着層にできるだけ触れないように注意する。

- 4) 本品を創部の一方の端から創に沿って慎重に貼付していき、創
面に密着させる。
- 5) 残る4分の1の剥離紙を剥がして、しっかり固定されるよう創部
に本品を密着させる。
- 6) 本品を引っ張り伸ばした状態で貼付しないこと。
- 7) 本品が剥がれるおそれのある場合は、補強のためにテープを本
品の周りに貼って固定する。
- 8) 本品を皮膚から除去する際には、片手で皮膚をそっと押さえな
がら、もう片方の手で慎重に本品の隅を注意深く持ち上げゆっ
くりと剥がす。本品を引き伸ばして接着面と皮膚の間に隙間を
作り除去する。

* 【使用上の注意】

1. 重要な基本的注意
 - *1) 本品又は本品の構成成分に過敏な人又はアレルギー反応を有
する人に、本品を使用してはならない。
 - 2) 本品の使用中に、創部に本品が原因と推察される臨床的感染
が起きた場合には、使用を中止し、適切な治療を行う。また、
患者の全身状態の悪化、全身管理の不足等によっても、創部
に感染症状が現れることがある。感染の兆候に十分注意し、
臨床的感染が認められた場合には、原則として使用を中止し、
適切な治療を行うこと。
 - 3) 本品を使用中に皮膚障害と思われる症状が現れた場合には、
使用を中止し、適切な治療を行うこと。
- *4) 創周辺部に粘着剤による発赤や滲出液の貯留による浸軟を起
こす場合がある。また、皮膚剥離を起こす場合もあるので、
本品の使用時には十分な観察を行い、本品の関与が否定でき
ない異常が見られた場合には直ちに使用を中止し、適切な治
療を行うこと。
- 5) 創部から出血が見られる場合には必ず止血処置を行うこと。
- 6) 十分な観察の下に使用し、長期使用は避けること。

* 2. 不具合・有害事象

一般的な被覆・保護材における使用において、以下の「有害
事象」が起こる可能性がある。

<その他の有害事象>

- ・創の感染症状
- ・創傷及び周囲の皮膚障害（表皮剥離、浸軟、浮腫、水疱、
発赤、びらん、そう痒、アレルギー、接触性皮膚炎）
- ・固着
- ・疼痛

* 3. その他の注意

- 1) 本品を切って使用しないこと。
- 2) 原則としてワセリン等油性製品との併用は避けること。
- 3) 本品をステープルや縫合といった一次閉鎖法に代わる手段と
して使用しないこと。
- 4) 再滅菌しないこと。

* 【保管方法及び有効期間等】

保 管 方 法：室温保存

* 保管の条件：高温、多湿を避ける。

有 効 期 間：外箱Exp参照（自己認証による）

* 使用 期 間：滲出液の漏れが起こる前、もしくは防水性外層の外
側から滲出液の広がりが見られる時点で本品を交
換する。

*【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

製造販売元

コンバテック ジャパン株式会社

☎ 0120-532384

*製造元：コンバテックリミテッド
ConvaTec Limited
英国



© 2016 ConvaTec Inc.