

2018 年 10 月（第 3 版）

2017 年 6 月（第 2 版）

機械器具(12) 理学診療用器具
一般医療機器 弾性ストッキング (JMDN コード：31724000)

プラスワンマジック Jukiner

【警告】

＜適用患者＞

次の患者には適用しないこと。


- ・重度の動脈血行障害、うっ血性心不全及び有痛性青股腫の患者
[圧迫により症状を悪化させる危険性が高いため]
- ・化膿性静脈炎の患者
[菌血症や敗血症を発生、悪化させるおそれがあるため]
- ・装着部位に極度の変形を有する患者
[適切な圧迫圧が得られないため]

＜使用方法＞

- ・医師が必要と認める場合を除き、就寝時は着用しないこと。
[臥位になることで静脈還流等に変化が起き、患者によっては必要以上の圧迫圧がかかるおそれがあるため]

【形状、構造及び原理等】

(1) 本品の外観図

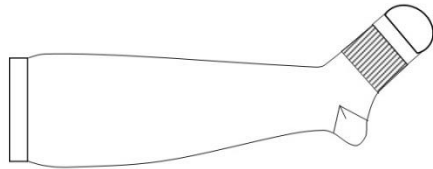

(2) 本品の原材料

ナイロン、ポリウレタン

(3) 本品の原理

ポリウレタン弾性糸の弾力により同心性の圧迫力を加えると同時に、末梢から中枢に向かって漸減的に圧迫を加え、静脈還流を促進する。

【使用目的又は効果】

本品は、下肢の静脈血、リンパ液のうっ滞を軽減又は予防する等、静脈還流の促進を目的に使用される器具である。本品は、末梢から中枢に向かい漸減的に圧迫を加える機能を有する。

【使用方法】

着脱の際には、爪や、指輪、ブレスレット等で生地を傷つけないようご注意ください。

＜履き方＞

- ①ストッキングの中に手を入れ、かかと部分を軽くつまみまます。
- ②そのままかかから太もも部分を折り返すように裏返します。
- ③裏返したストッキングをつま先からかかとの方へ履いていきます。
- ④かかとまでしっかりと履きます。
- ⑤足首部を合わせ、しわや重なりができないように表返ししながらゆっくりと上の方へと引き上げていきます。
- ⑥規定の長さまで引き上げれば装着完了です。しわのできやすい部分（足首やひざなど）は、しわができていないことを確認してください。

＜脱ぎ方＞

- ①ストッキングをかたまりにしないで少しずつ脱ぐと脱ぎやすくなります。
- ②かかとの部分では裏返しのまま伸ばし、丁寧に少しずつ引っ張ります。

【使用上の注意】

＜適用患者＞

次の患者には慎重に適用すること

- ・深部静脈血栓症の患者であり、本品を装着すると肺血栓塞栓症を起こすおそれのある患者
- ・動脈血行障害、うっ血性心不全及び装着部位に炎症性疾患、化膿性疾患、創傷のある患者
[圧迫により症状が悪化するおそれがあるため]
- ・装着部位に知覚障害のある患者
[血行障害を起こしても認識できないおそれがあるため]
- ・糖尿病患者
[無症状の知覚障害や血行障害を併発している可能性があり、痛み等の異常を認識できないおそれがあるため]
- ・繊維に対して、過敏症の患者
[接触性皮炎を起こす可能性があるため]

＜重要な基本的注意＞

- ・適正な圧迫圧を得るため、必ず正しいサイズの本品を選択してください。またサイズ適応外の場合には使用しないでください。
 - ・本品を折り返して使用しないでください。
[血行障害や知覚障害等を引き起こすおそれがあるため]
 - ・腫脹の軽減等により装着中に各部位の周径が変わった場合は、適切なサイズに変更してください。
 - ・本品に破損（伝線、ホツレ、破れ等）がないことを確認してから装着してください。破損がある場合は適正な圧迫圧が得られないため使用しないでください。
 - ・本品は繊維製品のため、次のような場合には破損（伝線、ホツレ、破れ等）する場合がありますので注意してください。
- ①強く引っ張り上げての装着や爪を立てた手での装着
 - ②爪が伸びていたり、反っていたりする足への装着
 - ③肌荒れした手や伸びた指の爪での取り扱い、鋭利なものへの接触
- ・本品をはさみで切るなど加工、修理を行わないでください。
 - ・軟膏などの薬品や油脂、溶剤等が付着すると繊維が劣化しますので、付着しないよう注意してください。
 - ・本品を他のストッキングや靴下等と重ね履きをしないでください。

【保管方法】

保管方法：室温下で、水濡れに注意し、直射日光及び高温多湿を避けて保管してください。

【保守・点検に係る事項】

洗濯をして繰り返し使用できます。洗濯の際は次のことに注意してください。

- ①ぬるま湯に中性洗剤を溶かし、手洗いしてください。
- ②塩素系漂白剤は絶対に使用しないでください。
- ③ドライクリーニングの使用は繊維を劣化させる恐れがありますので、絶対にしないでください。
- ④他の色物とは分離して洗ってください。
- ⑤直射日光は避け、風通しのよい場所で陰干ししてください。
- ⑥脱水機・乾燥機・アイロン・電子レンジなどでの強制乾燥は、生地が劣化し、弾力性が失われますので絶対に使用しないでください。

【製造販売業者の名称及び住所等】

株式会社コスミックエムイー
〒333-0848
埼玉県川口市芝下二丁目 31 番 3 号
電話：048-268-9811 FAX：048-269-0845