

\*\*2022年11月（第3版）  
 \*\*2022年3月（第2版）

機械器具（25）医療用鏡  
 一般医療機器 内視鏡用部品アダプタ（JMDNコード：37090010）


## BirdView 設置治具

### 【禁忌・禁止】

- 本品の先端には磁石が付いているので、体内に埋め込める医療機器には近づけないこと。
- 洗浄時において必ず手洗いで行うこと。[先端部に磁石を内蔵している為、機械洗浄実施時、洗浄機内部の金属粉などの異物が先端部に付着し、洗浄が不完全になる。また、自動洗浄時、本製品の先端部（底面）が洗浄機や他部材との衝突により変形し、引上げ能力低下の原因となる。]

### \*\*【形状、構造及び原理等】

<形状、構造>

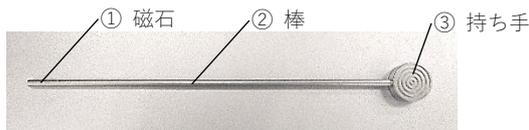

本品には②棒の長さの異なるバリエーションがある。

②棒	200	300	400
----	-----	-----	-----

単位：mm

部品名	原材料
磁石（先端に内蔵されている）	ネオジウム焼結磁石
棒	SUS304
持ち手	SUS304

<原理>

本品は、先端に磁石が埋め込まれており、コネクタキャップの先端の金属部分に、本品をくっつけて引き上げる。

### 【使用目的又は効果】

本品は、他の装置の接続を可能にするために用いるコネクタや機能追加用パーツである。器具、カテーテル、液体等を導入したり、吸引するため、コック又は器具ポートに取り付けることができる。

### \*\*【使用方法】


#### \*1. 使用前の確認

使用前に洗浄を行う。  
 また、本品は未滅菌状態である。使用前に高圧蒸気滅菌をする必要がある。  
 使用前に先端部にゆみや破損がないことを確認する。


#### \*\*2. 操作方法・使用方法

本品の使用方法は以下のとおり。尚、併用機器であるビデオ硬性腹腔鏡（販売名「BirdView カメラユニット」）と組み合わせた際の詳細な使用方法については腹腔鏡附属の添付文書及び取扱説明書を参照すること。

- 1) シャフトガイドが 5 mm 径の単回使用トロカールスリーブと 12mm 径の単回使用トロカールスリーブで設置され「BirdView カメラユニット」が 12 mm 径のカメラユニット単回使用トロカールスリーブから出た状態になっていることを確認する。

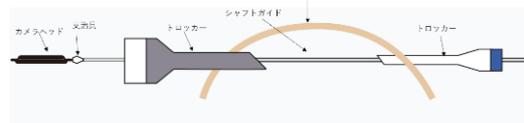

- 2) シャフトガイド収納されたコネクタキャップの先端の金属部分に、設置治具の先端をくっつけて、シャフトガイドと一緒に引き上げる。

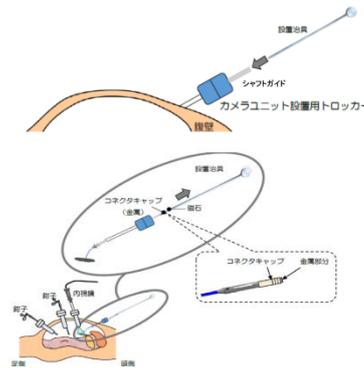

#### \*3. 使用後の処置

使用後は、施設の手順に従い洗浄・滅菌処理を行う。

### 【使用上の注意】

<重要な基本的注意>

使用する前に、高圧蒸気滅菌を行うこと。

### 【保守・点検に係る事項】

<点検>

使用前には、以下の点検を実施し、異常が確認された場合は使用しないでください。

- 本製品に腐食、へこみ、亀裂、曲がり、スリキズ、その他使用上の瑕疵がないこと。
- 洗浄剤や消毒剤が残っていないこと。
- 本製品を併用する医療機器と組み合わせたときに正しく機能すること。

<洗浄、消毒、滅菌>

(1) 洗浄は手洗いで行ってください。中性酵素洗剤と柔らかいブラシを使用し、汚れが見えなくなるまでブラッシング洗浄してください。（酸性及びアルカリ性の液剤との接触により、器具の保護コーティングが取り除かれ、腐食、孔食及び破損の恐れがあります。）

- (2) 使用後は、血液、体液、組織片の凝固を防止するために、可能な限り速やかに洗浄してください。
- (3) 精製水で器具に付着した洗剤を完全に洗い流してください。
- (4) 材質および構造上、すべての洗浄、消毒、滅菌方法を本製品に適用できるわけではありません。
- (5) 定期的に消毒と滅菌の全工程を監視し、管理してください。消毒工程を検証する有効な生物学的指標はありませんが、消毒薬の濃度 確認用に使用できる試験紙があります。薬液が消毒効果を発揮する濃度以下に薄められていないことを確認してください。又、滅菌工程を管理するために、適切な生物学的指標を使用してください。
- (6) 洗浄液、消毒液は、種々の侵食性化合物(塩化物など)を含有していることがあり、腐食により機器の損傷を引き起こすおそれがあります。滅菌水を使って機器から残留液を完全に洗い流してください。水道の水は、塩素処理されている可能性があるので可能な限り使用しないでください。
- (7) 本品を専用滅菌ケース又はトレーに収納し、滅菌パックに包装したのち滅菌を行ってください。

<推奨滅菌方法>

・高圧蒸気滅菌

推奨滅菌条件:滅菌設定温度 132℃、滅菌時間 2 分以上

**【製造販売業者の氏名又は名称等】**

株式会社コスミックエムイー

〒333-0848

埼玉県川口市芝下二丁目 31 番 3 号

電話:048-268-9811