

2022年4月（初版）

機械器具（25）医療用鏡  
一般医療機器 内視鏡用部品アダプタ（JMDNコード：37090010）

再使用禁止

## BirdView 固定具

### 【形状、構造及び原理等】



O.D：5mm I.D：4mm 長さ：160mm, 200mm

原材料：ポリ塩化ビニル

#### <原理>

本品はパイプ状のビデオ硬性腹腔鏡（販売名「BirdView カメラユニット」）専用の内視鏡用部品アダプタである。腹腔内でパイプの端で支治具を介して接続し組み合わせ、単回使用トロカールスリーブを介して用いるためのものである。

### 【使用目的又は効果】

単一の内視鏡部品を接続・統合して完全な内視鏡アセンブリを作製するための追加用パーツである。

### 【使用方法】

#### 1. 使用前の確認

本製品は、あらかじめ滅菌して供給される。使用期限・滅菌パックの破損や異物混入の有無等を確認する。

#### 2. 操作方法・使用方法

本品の使用方法は以下のとおり。尚、併用機器であるビデオ硬性腹腔鏡（販売名「BirdView カメラユニット」）と組み合わせた詳細な使用方法については腹腔鏡附属の添付文書及び取扱説明書を参照すること。

1) 本製品を「BirdView カメラユニット」（以下 BV という）コネクタ側から 5 mm 径の単回使用トロカールスリーブへ挿入し、設置治具でカメラユニットを引き上げて支治具に固定する。

2) 手術終了時において、本製品と支治具及びカメラヘッドの接続を解除後、BV のケーブル及びコネクタが本製品から引き抜かれた後は、直ちに本製品を単回使用トロカールスリーブから抜去する。

#### 3. 使用後の処置

使用後は、施設の手順に従い適切に処分する。

### 【使用上の注意】

#### <重要な基本的注意>

使用する前に、併用する単回使用トロカールスリーブとのクリアランスを確認すること。

### 【保管方法及び有効期間等】

1. 保管方法：水濡れに注意し、直射日光・高温多湿を避け室温にて保管のこと。

2. 有効期間：本品添付ラベル記載の使用期限参照のこと。

本体（併用医療機器）の取扱説明書を必ずご参照ください。