

* C P 0 1 0 6 0 3 *

【CP-01】

** 2024 年 4 月 (第 8 版)

* 2016 年 9 月 (第 7 版) (新記載要領に基づく改訂)

医療機器承認番号: 15800BZY00394000

機械器具 51 医療用嘴管及び体液誘導管
管理医療機器 単回使用汎用吸引チップ (JMDN コード: 35917102)

ヤンカーサクション

再使用禁止

【禁忌・禁止】

＜使用方法＞

1. 再使用禁止。
- * 2. 再滅菌禁止。


【形状・構造及び原理等】

* ＜概要＞


本品は創傷部又は口腔の体液排出させる吸引管である。

＜形状＞

1. 吸引器具本体

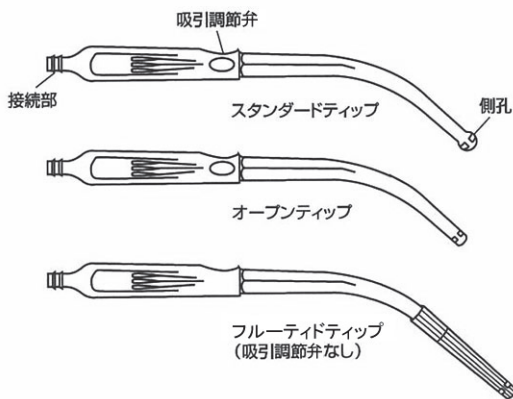

- * 2. チューブ

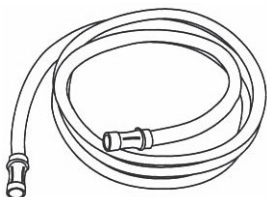

カタログ番号	ティップ形状	規格
3498	オープンティップ	調節弁付
3488	スタンダードティップ	調節弁付
3447	フルーティドティップ	調節弁なし
3496	スタンダードティップ	調節弁付 チューブ付

＜組成＞

名称	材質
* 吸引器具本体	ポリスチレン、ポリエチレンテレフタレート
* チューブ	* ポリ塩化ビニル (可塑剤: フタル酸ジ (2-エチルヘキシル) を含む)

【使用方法等】

* ＜使用方法＞

1. 本品は滅菌済みの製品である。開封し、無菌操作法を用いて取り出すこと。
2. コネクティングチューブを用いて本品を吸引装置に接続する。
3. 体液および洗浄液を吸引する。
4. 必要に応じて吸引調節弁を指で押さえることによって、吸引圧の調節を行うことができる。

＜使用方法等に関連する使用上の注意＞

- * 1. コネクティングチューブ付きの製品を使用する場合は、本製品とコネクティングチューブ、吸引装置のそれぞれの接続に緩みがないことを確認すること。
2. コネクティングチューブは閉塞しないよう、過度に折り曲げたり踏みつけるなどしないこと。

【使用上の注意】

1. 重要な基本的注意

- * (1) 本品はポリ塩化ビニルの可塑剤であるフタル酸ジ-2-エチルヘキシルが溶出するおそれがあるので注意すること。

【保管方法及び使用期間等】

- * 1. 保管上の注意

- (1) 水濡れに注意し、高温、多湿、直射日光の当たる場所を避けて常温で保管すること。
- (2) 保管環境
温度 10～32℃

* ＜有効期間＞

5 年間 [自己認証 (当社データ) による]
本品のラベルの使用期限を参照すること。

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

製造販売元

** エム・シー・メディカル株式会社

* 電話番号: 06-6222-6606

製造元

コンメド社 (アメリカ合衆国)

CONMED Corporation