



* | S 2 7 0 1 0 4 *

【IS-27】

** 2024 年 11 月 (第 4 版)

* 2024 年 4 月 (第 3 版)

医療機器認証番号: 219AFBZX00002000

機械器具 6 呼吸補助器
管理医療機器 人工鼻 (JMDN コード 70570000)

インターサージカル人工鼻

再使用禁止

【警告】

＜使用方法＞

- 使用前に接続に誤りがないか、使用前および使用中に各接続部が気密かつ確実に漏れや閉塞がないか、また、酸素の吹き出しを確認すること。[適切な呼吸管理が行えないおそれがある。]
- 使用中は患者の状態を定期的に観察すること。[患者の異常を発見できないおそれがある。]

【禁忌・禁止】

＜併用医療機器＞

- 本品と加温加湿器、ネブライザを併用しないこと。[「相互作用」の項参照]

＜使用方法＞

- 再使用禁止
- 本品は 24 時間を超えて使用しないこと。[流量抵抗の上昇、あるいは閉塞により、換気が行えないおそれがある。]

【形状・構造及び原理等】

** <形状>



品番	患者側ポート	ハウジング	機械側ポート	サンプリングポート
1850000	22M/15F	内部に呼気の熱と水分を捕捉するメンブレンが備わっている。	15M	—
1855000				内径約 4mm の中空ポートを有する。

項目	品番	1850000	1855000
1. 湿度交換率		30.0mgH ₂ O/L (一回換気量 500mL で)	
2. 流量抵抗		3.0hPa (60L/min の連続フロー、未使用状態で)	
3. 容量		15mL	16mL
4. 重さ		11g	12g
5. 最低一回換気量		≥60mL	
6. 最大一回換気量		1000mL	
7. 漏れ		5mL/min 未満	
8. コンプライアンス		1.2mL/kPa 以下	

＜作動・動作原理＞

本品を呼気が通過する際、本品のメンブレン(ハウジング内に備わるフィルタ膜)によって呼気の熱及び水分を捕捉し、それらを吸気ガスに供することにより加温及び加湿するものである。

【使用目的又は効果】

＜使用目的＞

患者の人工気道に沿って接続した場合等に、患者の呼気の熱と水分を捕捉し、これらを利用して吸気ガスを加温及び加湿すること。

【使用方法等】

＜使用方法＞

- 使用
 - 機械側ポート及び患者側ポートをそれぞれ人工呼吸器のガスラインへ接続する。
 - 24 時間毎に新しいものと交換すること。

＜使用方法等に関連する使用上の注意＞

- 患者からの分泌物が付着していないか定期的に確認すること。本品内に患者の分泌物などが付着した場合、速やかに交換すること。

【使用上の注意】

- 使用注意(次の患者には慎重に適用すること)
 - 粘度の高い分泌物及び過度の分泌物がある患者。[流量抵抗の上昇、あるいは閉塞により、換気が行えないおそれがある。]
- 重要な基本的注意
 - 保管中、未開封の本品の内部に水滴が生じる場合があるが、メンブレン原材料の添加剤(塩化カルシウム)がパッケージ中の水蒸気を吸収することによって起きるもので、本品を使用するに際しては何ら問題がない。
 - 消毒・滅菌処理しないこと。[本品に収縮・破損など品質上の不具合が生じる可能性があるため。]
 - 使用前に水や薬液で濡らさないこと。
 - 本品に過度な負荷をかけないこと。[本品の破損等により品質上の不具合が生じる可能性があるため。]
 - コネクタの接続は、形状が適合する相手方に対して行い、適度な力で接続すること。
 - 使用中は、本品内に回路内の水分が流入しないように配置に気をつけること。
- 相互作用(他の医薬品・医療機器等との併用に関すること)
 - 併用禁忌(併用しないこと)

医療機器の名称等	臨床症状・措置方法	機序・危険因子
・加温加湿器 ・ネブライザ	流量抵抗の上昇、換気が困難となるおそれがある。	本品の閉塞

- 併用注意(併用に注意すること)

閉鎖式吸引システムを使用する場合には、過剰の洗浄液が本品内部に入り、流量抵抗が上昇するおそれがあるため、注意すること。

【保管方法及び有効期間等】

1. 保管上の注意

- 室温下で保管すること。
- 水に濡れないように保管すること。

- (3) 直射日光の当たる場所、高温・多湿な場所、過度なほこりが発生する場所、空気中に塩分やイオウ分を含む場所での保管は避けること。
- (4) 重ねて保管する場合には重みで本品が破損しないように配慮すること。

＜有効期間＞

本品のラベルの使用期限を参照すること。

** ＜使用期間＞

24時間 [自己認証(当社データ)による]

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

製造販売元

* エム・シー・メディカル株式会社

** 大阪市中央区今橋 2-5-8 トレードピア淀屋橋

電話番号：06-6222-6606

製造元

インターサージカル社(英国)

Intersurgical Limited