



* G M 2 6 0 8 0 3 *

【GM-26】

** 2024 年 4 月 (第 9 版)

* 2016 年 10 月 (第 8 版) (新記載要領に基づく改訂)

医療機器承認番号: 22000BZX01578000

機械器具 6 呼吸補助器

管理医療機器 単回使用呼吸回路用コネクタ (JMDN コード: 34838012)

フレアアダプター

再使用禁止

【警告】

* <使用方法>

使用前に本品の接続に誤りがないか、使用前及び使用中に各接続部が気密かつ確実であり、漏れや閉塞がないことを確認すること。[適切な酸素投与を行えないおそれがある。]

【禁忌・禁止】

<使用方法>

- * 1. 再使用禁止。

【形状・構造及び原理等】

* <形状>

本品は未滅菌品である。



<作動・動作原理>

流量計と酸素チューブとを接続することで、医療ガスの供給を仲介する。

【使用目的又は効果】

* <使用目的>

本品は呼吸回路と気管内チューブ、フェースマスク、他の呼吸回路のコンポーネントを接続するために用いる単回使用器具である。

【使用方法等】

<使用方法>

1. 酸素流量計を O₂ 配管に接続する。
2. 酸素流量計の酸素吐出口に本品コネクターナットを回転させ接続する。
3. 酸素チューブを本品接続部に脱落しないようにしっかりと接続する。

* <使用方法等に関連する使用上の注意>

火気のある場所及び発火のおそれのあるものの近くでは酸素を使用しないこと。[火災発生のおそれがある。]

【使用上の注意】

1. 重要な基本的注意

- * (1) 本品の滅菌は行わないこと。[製品に変形及び破損の発生、有毒ガスが残留するおそれがある。]
- * (2) フェノールやエーテルなどの有機溶媒やホルマリン系消毒剤は使用しないこと。[製品の変形及び破損のおそれがある。]

【保管方法及び有効期間等】

* 1. 保管上の注意

水濡れに注意し、高温、多湿、直射日光のあたる場所を避けて室温で保管すること。

<有効期間>

本品のラベルの使用期限を参照すること。

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

製造販売元

** エム・シー・メディカル株式会社

* 電話番号: 06-6222-6606

製造元

ゲイルメッド社(台湾)

GaleMed Corporation