

* | S 3 7 0 1 0 3 *

【IS-37】

** 2024 年 4 月 (第 3 版)

* 2017 年 5 月 (第 2 版) (新記載要領に基づく改訂)

医療機器認証番号: 223AFBZX00034000

機械器具 6 呼吸補助器

管理医療機器 単回使用人工呼吸器呼吸回路 (JMDN コード 37706000)

インターサージカル単回使用コネクタ S

再使用禁止

* 【警告】

＜使用方法＞

1. 使用前に接続に誤りがないか、使用前および使用中に各接続部が気密かつ確実に漏れや閉塞がないか、また、酸素の吹き出しを確認すること。[適切な呼吸管理が行えないおそれがある。]
2. 使用中は患者の状態を定期的に観察すること。[患者の異常を発見できないおそれがある。]


* 【禁忌・禁止】

＜使用方法＞

1. 再使用禁止
2. 再滅菌禁止

【形状・構造及び原理等】

＜形状＞

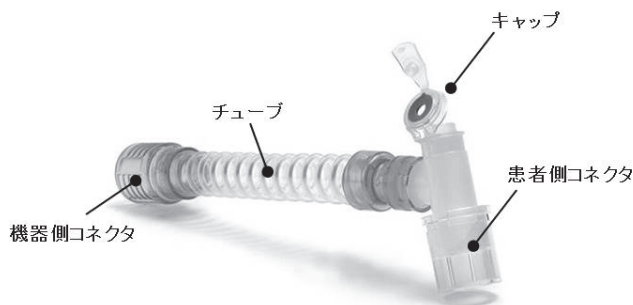

本品の機械側コネクタは 22F で人工呼吸器呼吸回路等に接続する。

品番	患者側コネクタ	回路長
5120000S	22M/15F スウィベル	0.16m
5180000S	9.5mm ポート 及び	0.20m
5250000S	シールアラウンドキャップ付き	0.27m

【使用目的又は効果】

＜使用目的＞

人工呼吸器又は麻酔器から患者への空気又は酸素を含むガスの送込に用いること。

【使用方法等】

＜使用方法＞

1. 使用

- (1) 患者側コネクタと機械側コネクタをそれぞれ相手方に接続し、ガスラインを構成する。このとき、本品が構成するガスライン全体で、閉塞又はリーク(漏れ)などを起こさないことを必ず確認すること。
- (2) 使用中は、本品を接続したガスライン全体において閉塞又はリーク(漏れ)などの異常が起きていないことを確認すること。万一異常が起きた場合には、直ちに使用を中止すること。

【使用上の注意】

1. 重要な基本的注意

- (1) 使用前に水や薬液で濡らさないこと。
- * (2) 本品に過度な負荷をかけないこと。[本品の破損等により品質上の不具合が生じる可能性があるため]
- (3) コネクタの接続は、形状が適合する相手方に対して行い、適度な力で接続すること。
- (4) 使用中、呼吸回路内に溜まった水分が逆流しないように、呼吸回路構成部品全体の配置に気をつけること。

【保管方法及び有効期間等】

1. 保管上の注意

- (1) 室温下で保管すること。
- (2) 水に濡れないように保管すること。
- (3) 直射日光の当たる場所、高温・多湿な場所、過度なほこりが発生する場所、空气中に塩分やイオウ分を含む場所での保管は避けること。
- (4) 重ねて保管する場合には重みで本品が破損しないように配慮すること。

＜有効期間＞

5 年間 [自己認証による]

* 本品のラベルの使用期限を参照すること。

＜使用期間＞

7 日間 [自己認証(当社データ)による]

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

製造販売元

** エム・シー・メディカル株式会社

電話番号: 06-6222-6606

製造元

インターサージカル社(英国)

Intersurgical Limited