

* C P 0 6 0 4 0 3 *

【CP-06】

** 2024 年 4 月 (第 4 版)

* 2016 年 5 月 (第 3 版) (新記載要領に基づく改訂)

医療機器届出番号: 27B1X00116000187

機械器具 51 医療用嘴管及び体液誘導管
一般医療機器 吸引チューブ (JMDN コード: 16779000)

ディスプレイザブル コネクティングチューブ (ロングタイプ)

再使用禁止

【禁忌・禁止】


＜使用方法＞

1. 再使用禁止。

【形状・構造及び原理等】

＜形状＞

* 本品は未滅菌の製品である。

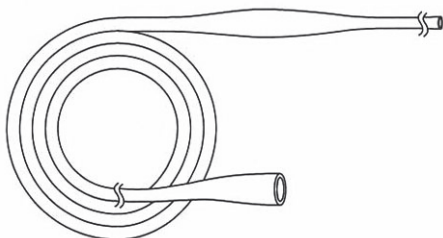

型番	全長 (m)	内径 (mm)
4825	30.5	4.8
4826	30.5	6.4
4827	30.5	7.1

＜組成＞

ポリ塩化ビニル (可塑剤: フタル酸ジ-2-エチルヘキシルを含む)

＜作動・動作原理＞

吸引器より吸引された血液、体液、分泌液、骨片等が本品を介して回収容器に送られる。

【使用目的又は効果】

＜使用目的＞

本品は、吸引器と回収容器との接続に用いる柔軟性のある未滅菌のプラスチック製のチューブである。

【使用方法等】

＜使用方法＞

1. パッケージから必要な長さのチューブを取り出す。
- * 2. 接続する機器の径に合わせて切離する。チューブには 90cm 毎に径が膨らんだ部分があり、切離口の径を調整できる。膨らみの中央部を切離すると、接続部がファネルタイプになり、メスタイプとして接続することができる。膨らみの末部を切離すると、接続部がテーパータイプになり、オスタイプとして接続することができる。

この箇所を切断すれば、
接続部がファネルタイプ
になる。

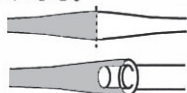


図1

この箇所を切断すれば、
接続部がテーパータイプ
になる。

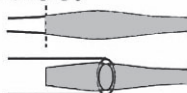


図2

- * 3. 吸引器具および吸引装置に接続する。

＜使用方法等に関連する使用上の注意＞

1. コネクティングチューブが閉塞しないように、過度に折り曲げたり踏みつけたりしないこと。

【保管方法及び有効期間等】

- * 1. 保管上の注意

(1) 水濡れに注意し、高温、多湿、直射日光の当たる場所を避けて常温で保管すること。

(2) 保管環境

温度 10～32℃

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

製造販売元

** エム・シー・メディカル株式会社

* 電話番号: 06-6222-6606

製造元

コンメド社 (アメリカ合衆国)

CONMED Corporation