



* | S 9 9 0 1 0 3 *

【IS-99】

** 2024 年 4 月 (第 3 版)

* 2021 年 2 月 (第 2 版)

医療機器届出番号: 27B1X00116000250

機械器具 76 医療用吸入器
一般医療機器 非加熱式加湿器 (JMDN コード: 35113000)

インターサージカルヒューミディファイヤー (蛇管)

再使用禁止

【警告】

＜使用方法＞

- 使用前に接続に誤りがないか、使用前および使用中に各接続部が気密かつ確実に漏れや閉塞がないか、また、酸素の吹き出しを確認すること。[適切な呼吸管理が行えないおそれがある。]
- 使用中は患者の状態を定期的に観察すること。[患者の異常を発見できないおそれがある。]

【禁忌・禁止】


＜使用方法＞

- 再使用禁止
- 火気のある場所及び発火のおそれのあるものの近くでは本品を使用しないこと。[火災発生のおそれがある。]

【形状・構造及び原理等】

* ＜形状＞

本品は未滅菌品である。

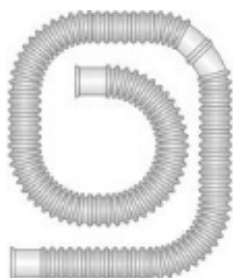

カタログ番号	規格	節の間隔
1573000	50m	15cm
1573004	50m	15cm
1574000	50m	40cm

＜作動・動作原理＞

酸素ガスまたは酸素/空気の混合ガスがボトル内の滅菌精製水等を通過することによって加湿され、その加湿された酸素ガスまたは酸素/空気の混合ガスが患者に供給される。

【使用目的又は効果】

＜使用目的＞

乾燥したガスに水蒸気を添加するために用いる。

【使用方法等】

＜使用方法＞

- 必要な長さを取り、節の中心部分を適切に切断する。
- 酸素マスクやネブライザー等と接続し、呼吸用回路の部品として使用する。

＜使用方法等に関連する使用上の注意＞

- * 1. ネブライザー等と併用する場合、貯留した水をウォータートラップ等にて回収し、患者等に水が触れないようにすること。[細菌感染のおそれ、または内腔が狭窄することにより、適切な酸素投与をおこなえないおそれがある。]

【使用上の注意】

- 重要な基本的注意
 - 消毒・滅菌処理しないこと。[本品に収縮・破損など品質上の不具合が生じる可能性があるため]
 - 本品に過度な負荷をかけないこと。[本品の破損等により品質上の不具合が生じる可能性があるため]

【保管方法及び有効期間等】

- 保管上の注意
 - 水に濡れないように保管すること。
 - 直射日光の当たる場所、高温・多湿な場所、過度なほこりが発生する場所、空気中に塩分やイオン分を含む場所での保管は避けること。
 - 重ねて保管する場合には重みで本品が破損しないように配慮すること。

＜有効期間＞

本品のラベルの使用期限を参照すること。

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

製造販売元

** エム・シー・メディカル株式会社

電話番号: 06-6222-6606

製造元

インターサージカル社(英国)

Intersurgical Limited