



* M T 0 6 0 1 0 1 *

【MT-06】

2024 年 4 月（第 1 版）

医療機器届出番号：27B1X001160MT003

機械器具 25 医療用鏡
一般医療機器 内視鏡用部品アダプタ（JMDN コード：37090010）

デイスポ鉗子栓

再使用禁止


【禁忌・禁止】

＜使用方法＞

- 再使用禁止

【形状・構造及び原理等】

＜形状＞

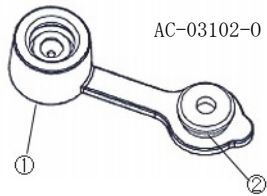

・各部の説明

番号	名称	機能及び動作	原材料※
①	本体	内視鏡のワーキングチャンネルに取り付ける部分。 中央の開口部より内視鏡処置具等を挿入する。	シリコーンゴム
②	キャップ	本体に被せるキャップ。	

※組織、体液又は血液に直接又は間接的に接触することがある部分

【使用目的又は効果】

＜使用目的＞

本品は、内視鏡手術の際に、内視鏡の鉗子口に取り付けて使用し、体内の体液等が逆流するのを防止する。

【使用方法等】

＜使用方法＞

- 使用前
 - 本品の外観に異常がないことを目視で確認する。外観に異常が見られた場合は使用せず、破棄する。
- 使用中
 - 内視鏡の鉗子口に、本品を取り付ける。
 - 必要に応じて、本体中央の開口部にシリンジを差し込み、送液または吸引を行う。
 - 本品の本体開口部より内視鏡用処置具を挿入し、目的の処置を行う。
 - 処置が完了したら、内視鏡を抜き取り、本品を内視鏡の鉗子口から取り外す。
- 使用后
 - 本品は単回使用のため、使用後は医療用廃棄物として廃棄する。

【保管方法及び有効期間等】

1. 保管上の注意

- 室温下で、高温多湿および水濡れを避けて保管すること。

＜有効期間＞

本品のラベルの使用期限を参照すること。

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

製造販売元

エム・シー・メディカル株式会社

電話番号：06-6222-6606

製造元

マイクロテック社(中華人民共和国)

Micro - Tech (Nanjing) Co., Ltd.

＜ラベルに記載されている記号の説明＞

	品番		製造年月日
	ロット番号		使用期限
	再使用禁止		水濡れ禁止
	直射日光を避けて保管		包装が破損している場合は使用禁止
	未滅菌		添付文書を参照
	注意事項		製造業者