

器具機械 11 放射線障害防護用器具
 一般医療機器 放射線防護用掛布 38357000
エッジプロテクタ



【警告】

本品を針生検等観血的CT透視下で使用する時は、滅菌シートに包んで使用すること。
 本品のエッジ部をCTスライス面に極力接近させて使用すること。

【禁忌・禁止】

1. エッジ部に重い物を載せないこと。
2. エッジ部を強い力で折り曲げないこと。
3. マジックテープを剥がして使用しないこと。


【形状・構造及び原理等】

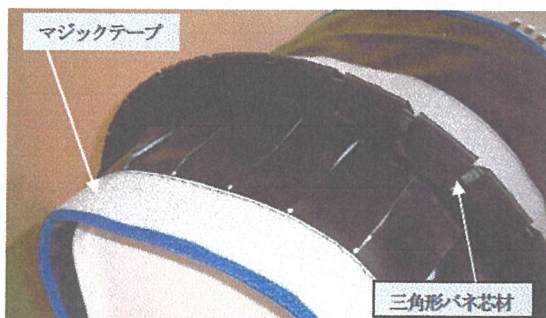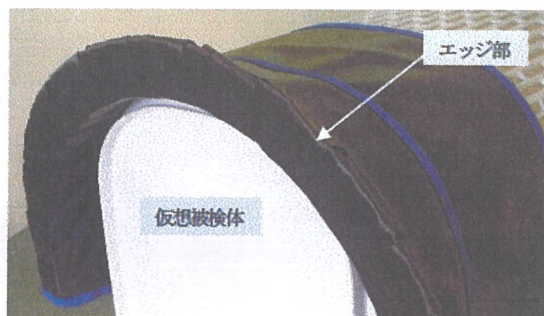

【使用目的、効能又は効果】


本品はCT透視ガイド下で「CT穿刺器ニードルガイド」を使用した針生検や「CT穿刺器ニードルクリップ」を使用したRFA電極針穿刺において、被検者から発生する後方散乱X線から術者の被曝を防護する目的のプロテクタです。

このエッジプロテクタを被検者のCTスライス面に近接して掛けることによって、後方散乱X線を下図のようにカットすることができ、術者の被曝を大幅に軽減することができます。

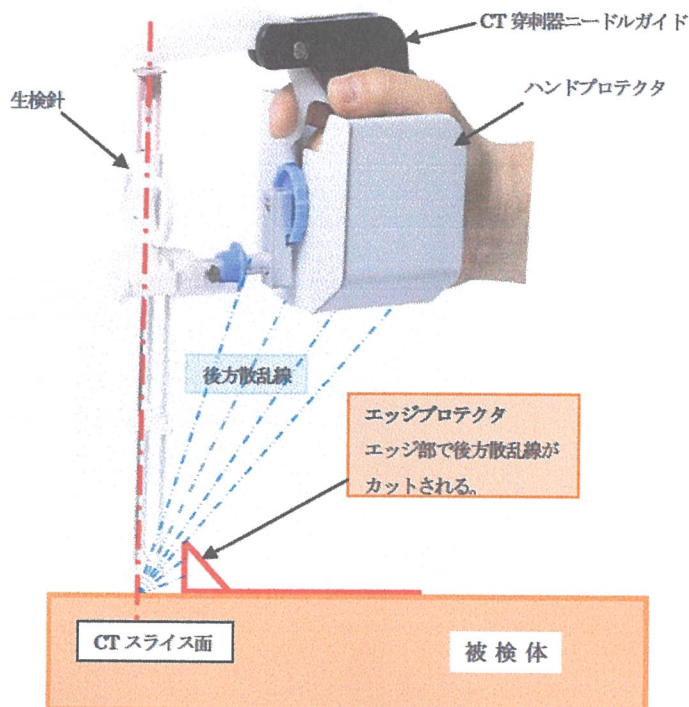

【品目仕様】

下図にエッジプロテクタ各部の鉛当量を示す。

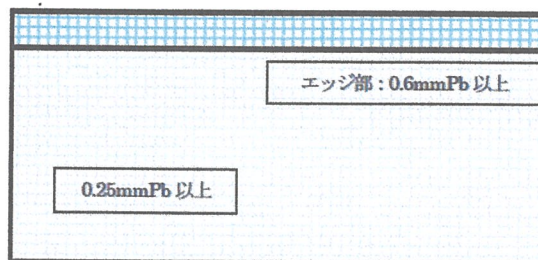

大きさ：200mm (縦) × 580mm (横) 重量：約800g

【使用上の注意】

滅菌施術に使用する場合は、滅菌ドレープ等で覆って使用すること。

【包装】

エッジプロテクタ・・・1枚 (包装箱に収納)

【製造販売業者の名称及び住所】

製造販売業者名：(株) 六 濤

住所：〒113-0033 東京都文京区本郷3-14-3

TEL: 03-3813-7045