

C T 穿刺器 ニードルクリップ


【警告】

有資格者以外は、本器具を使用しないでください。
未滅菌での使用はしないでください。

【禁忌・禁止】

- ・本器具は改造してはなりません。安全性または機能を損なうことになります。
- ・オートクレーブ滅菌はしないでください。
- ・洗浄は中性洗剤を使用し、アルカリ性の洗浄剤は使用しないで下さい。

【形状、構造及び原理等】

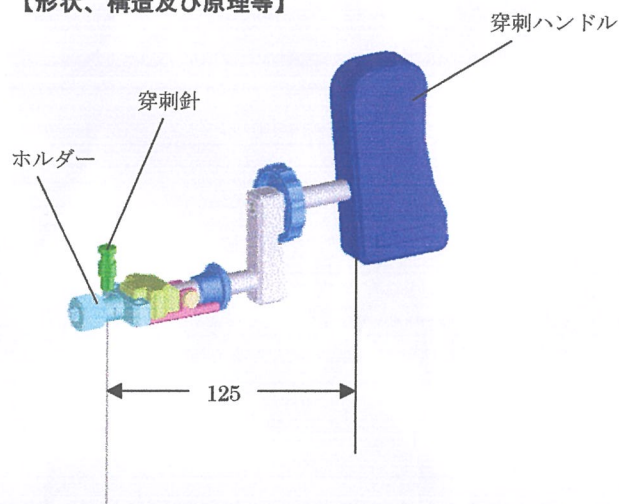

【使用目的、効能又は効果】


- ・C T透視下での針生検において、術者が直接X線を被曝せず、また散乱X線の被曝を最小限にとどめることを目的とした穿刺器具。
- ・術者は穿刺針を直接保持しないので、C T透視による直接X線を被曝しない。
- ・術者はハンドプロテクタによって、散乱X線による手の被曝を防護できる。

【品目仕様】

- ・C Tスライス面から穿刺ハンドルまでの距離：約125mm
- ・ハンドプロテクタの鉛当量：0.3mmPb
- ・重量：約400g（ハンドプロテクタ装着時）
- ・針のホルダー装着最大径：3mmΦ


【操作方法又は使用方法等】

(1) 針のホルダー装着

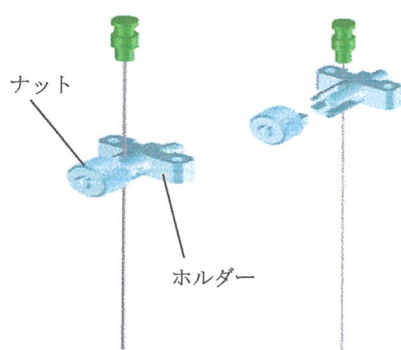


- ・ホルダーの孔に針を通し、締付けナットで強く締付けて下さい。
- ・刺入状態でホルダーを取り去る時は、締付けナットを緩めて抜いて下さい。

(2) 穿刺ハンドルへの針ホルダーの装着

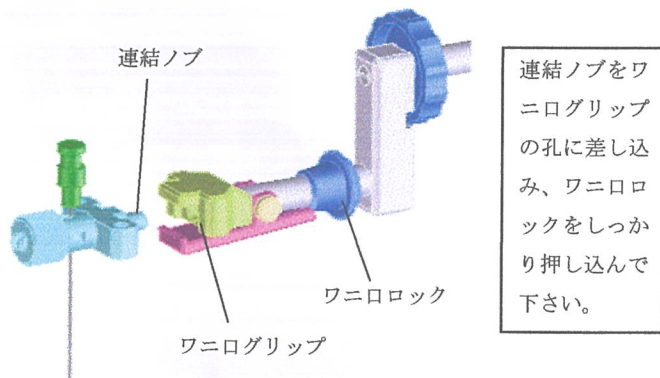

連結ノブをワニログリップの孔に差し込み、ワニロックをしっかり押し込んで下さい。

(3) ハンドプロテクタの装着

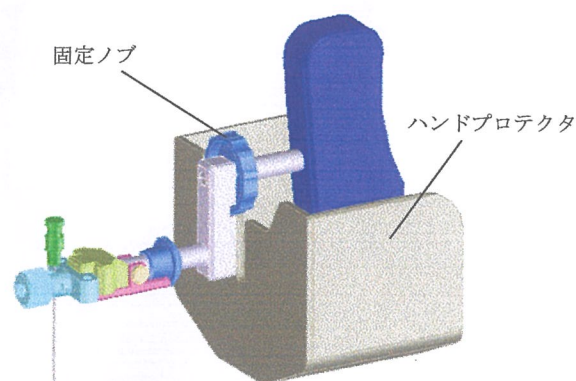

シャフトの溝にハンドプロテクタを差し込み、底の穴と位置決めピンを合わせてから固定ノブを締め付けて下さい。

【使用上の注意】

- ・本体：洗浄、滅菌消毒を行って繰り返し使用して下さい。
- ・ホルダーは単回使用として下さい。
- ・滅菌方法：ガス滅菌又はプラズマ滅菌をして下さい。
(オートクレーブ滅菌は不可)

【包装】

品名	型名	数量
本体	RTBC-I	1
ホルダー	RSH-1A	5（別箱）
ハンドプロテクタ	RPH-1A	1

製品管理：出荷履歴を箱の側面に表示した serial 番号で管理しておりますので、ご使用開始時にこの番号を記録しておいて下さい。

【製造販売業者の名称及び住所】

製造販売業者名：(株) 六濤

住所：〒113-0033 東京都文京区本郷3-14-3

TEL: 03-3813-7045