


器具器械（65） 歯科用充填器
一般医療機器 歯科用充填器 70680000
ボーンパッカー

【禁忌・禁止】


1. 本品は記載の使用目的以外に使用しないこと。

【形状・構造及び原理等】


＊ 1. 構成品

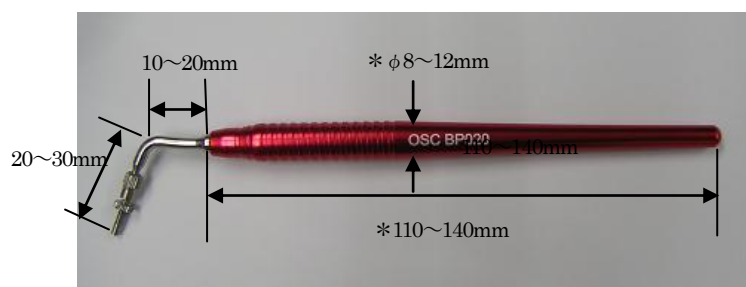

製品番号：BP-020 先端部の径：φ2.0mm±0.1

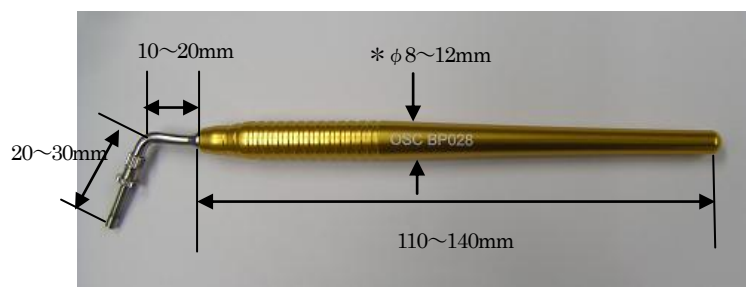

製品番号：BP-028 先端部の径：φ2.8mm±0.1

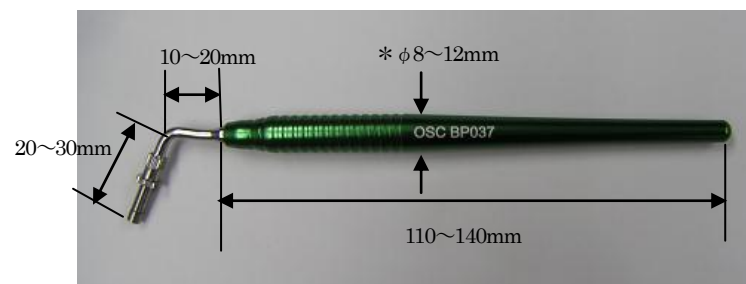

製品番号：BP-037 先端部の径：φ3.7mm±0.1

【使用目的、効能又は効果】

本品は、歯科用セメント、歯科用充填用コンポジットレジン、歯科用支台築造材料、歯科用小窩裂溝封鎖材、歯科用裏層材料、歯科用覆髄材料、歯科用仮封材等の歯科材料又は覆罩剤等の歯科用医薬品を歯牙に充填、塗布するため等に用いる再使用可能な手用器具をいう。ただし「歯科用圧入充填器」に該当するものを除く。

【品目仕様】

目視検査で、使用上問題となるようなキズが認められないこと。

【操作方法又は使用方法等】

1. 骨孔の径に合ったボーンパッカーを選定する。
2. 選定したボーンパッカーのストッパーを骨孔の深さと一致する高さに調整する。
3. 歯科用医薬品等を相応太さのボーンパッカーにて押し入れる。

【使用上の注意】

1. 重要な基本的注意

- 1) 本品の使用に際しては、歯科技術に熟練し、かつ製品特性や手術手技を十分に理解した歯科医療有資格者以外は使用しないこと。
- 2) 本品は未滅菌製品であるため、口腔内に適用する前には必ず洗浄・滅菌すること。
- 3) 本品を使用している際には、常に患者の全身のおよび口腔内の状態を観察し、異常が認められた場合、直ちに使用をやめ、適切な処置を取り、患者の安全を確保すること。
- 4) 術中に患者が本品を誤飲しないように十分注意して使用すること。
- 5) ボーンパッカー及びストッパー等の部品に異常がないか使用前に十分確認すること。亀裂、欠損等の問題がある場合には使用しないこと。
- 6) 使用中過度な力を加えないこと。膜の穿孔等を起こす危険性があるため。
- *7) ネジ先端部のキャップは、ゆるみがないか使用前に確認すること。ゆるみがあれば、きつく締めつけて使用すること。

【貯蔵・保管方法および使用期間等】

＜貯蔵・保管方法＞

- ・水ぬれに注意し、直射日光及び高温多湿を避けて保管すること。

【包装】

1 セット/3 本一組

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称及び住所等】

製造販売業者：コアフロント株式会社

〒162-0845

東京都新宿区市谷本村町 2-11

TEL：03(5579)8710

製造業者：オゾン エムエヌディ シーオー

国名：韓国