

2021 年 7 月 29 日（新様式第 3 版）

医療機器製造販売届出番号：13B1X10100000069

歯 08 歯科用石こう及び石こう製品
一般医療機器 歯科用樹脂系模型材 34811000

Freeprint 3D Printer 材料

【警告】

歯科医師、歯科技工士、歯科関係者以外は使用しないこと。

31	Freeprint 3D Printer 材料	Freeprint cast 2.0 385 0.5kg 02548
----	-------------------------	------------------------------------

【形状・構造及び原理等】

概要

本品は、歯科用模型等を作る樹脂系材料である。

本品は以下の構成から成る。

	製品名	製品番号
1	Freeprint 3D Printer 材料	Freeprint model UV sand 03778
2	Freeprint 3D Printer 材料	Freeprint model UV ivory 03780
3	Freeprint 3D Printer 材料	Freeprint model UV grey 03782
4	Freeprint 3D Printer 材料	Freeprint model 405 sand 03065
5	Freeprint 3D Printer 材料	Freeprint model 405 ivory 03779
6	Freeprint 3D Printer 材料	Freeprint model 405 grey 03781
7	Freeprint 3D Printer 材料	Freeprint model T UV 02332
8	Freeprint 3D Printer 材料	Freeprint model T 405 02322
9	Freeprint 3D Printer 材料	Freeprint cast UV 03789
10	Freeprint 3D Printer 材料	Freeprint cast 405 03788
11	Freeprint 3D Printer 材料	Freeprint cast UV 03710
12	Freeprint 3D Printer 材料	Freeprint cast 405 02890
13	Freeprint 3D Printer 材料	Freeprint temp UV A1 04062
14	Freeprint 3D Printer 材料	Freeprint temp UV A2 04063
15	Freeprint 3D Printer 材料	Freeprint temp UV A3 04064
16	Freeprint 3D Printer 材料	Freeprint temp UV A1 04058
17	Freeprint 3D Printer 材料	Freeprint temp UV A2 04059
18	Freeprint 3D Printer 材料	Freeprint temp UV A3 04060
19	Freeprint 3D Printer 材料	Freeprint model 2.0 385 sand 02128
20	Freeprint 3D Printer 材料	Freeprint model 2.0 385 light grey 02099
21	Freeprint 3D Printer 材料	Freeprint model 2.0 385 grey 02177
22	Freeprint 3D Printer 材料	Freeprint model 2.0 385 caramel 02850
23	Freeprint 3D Printer 材料	Freeprint model 2.0 385 white 02148
24	Freeprint 3D Printer 材料	Freeprint IBT 385 1kg 04249
25	Freeprint 3D Printer 材料	Freeprint IBT 385 0.5kg 04248
26	Freeprint 3D Printer 材料	Freeprint gingiva 385 1kg 02843
27	Freeprint 3D Printer 材料	Freeprint gingiva 385 0.5kg 02820
28	Freeprint 3D Printer 材料	Freeprint denture 385 1kg 02040
29	Freeprint 3D Printer 材料	Freeprint denture 385 0.5kg 02060
30	Freeprint 3D Printer 材料	Freeprint cast 2.0 385 1kg 02632

【使用目的、効能又は効果】

本品は、歯科用模型等を作る樹脂系材料である。

【性能及び安全性に関する規格】

目視	液体状態で異物が入っていないこと
----	------------------

【操作方法又は使用方法等】

- ・本品は、歯科用模型等を作る樹脂系材料である。光で重合する性質を利用し、3D プリンターにて造形する。
- ・具体的使用方法はマニュアルをご参照ください。

【使用上の注意】

1. 重要な基本的注意

- ・本品の使用に際しては、歯科技術に熟練し、かつ製品特性を十分に理解した歯科医師、歯科技工士、歯科関係者以外は使用しないこと。
- ・本品は口腔内には使用しないこと。

【貯蔵・保管方法および使用期間等】

本品は、高温多湿を避け、暗所で保管すること。

本品は、歯科医療関係者以外が触れないように適切に保管

- ・管理すること。

【包装】

1 本/袋

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称及び住所等】

製造販売業者：コアフロント株式会社

〒162-0845 東京都新宿区市谷本村町 2-11

TEL：03（5579）8710

製造業者：Detax GmbH & Co. KG

国 名：ドイツ