

Ora-Aid（オーラ エイド）

【禁忌・禁止】

1. 再使用禁止。
2. 目的外使用禁止。

【使用上の注意】

- ・本品使用中に過敏症状が現れた場合は、使用を中止し、医師または歯科医師に相談して適切な治療を受けること。
- ・本品は、記載の使用目的以外には使用しないこと。

【形状・構造及び原理等】

概要

本品は、口腔粘膜の創傷を一時的に被覆、保護するために用いるパッドである。単品または組合せで製造販売する。
本品は接着面、保護面、剥離面から成る。

【貯蔵・保管方法および使用期間等】

本品は、高温多湿を避け、暗所で保管すること。

寸法

本品のサイズは下記のとおりである。

OB23 25×15mm

OB53 50×15mm

【包装】

20 袋/箱

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称及び住所等】

製造販売業者：コアフロント株式会社

〒162-0845 東京都新宿区市谷本村町 2-11

TEL：03（5579）8710

【使用目的、効能又は効果】

本品は、口腔粘膜の創傷を一時的に被覆、保護するために用いるパッドである。

製造業者：TBM Corporation

国名：韓国

【性能及び安全性に関する規格】

目視	外観上の欠陥、破損、異物の付着混入がないこと。
寸法	寸法は規格値の許容誤差範囲であること（±10%）

【操作方法又は使用方法等】

1. 創面を消毒液または生理食塩水にてきれいに洗浄してください。
2. 外装を開封し、本品を取り出します。
3. 必要に合わせて適当なサイズに切ってください。
4. 剥離面を剥がし、接着面を創面に合わせ貼り付けてください。
5. 軽く 3~5 秒位押し付けてください。
6. 24 時間以内に新しいものに貼替えてください。

