

医 04 整形用品  
一般医療機器 歯科咬合スプリント用材料 70914000  
**Detax 3D Print スプリント用材料**  
添付文書

**【警告】**

歯科医師、歯科技工士、歯科関係者以外は使用しないこと。

**【形状・構造及び原理等】**

概要

本品は、歯科用咬合スプリントを作製するために用いる材料である。

本品は以下の構成から成る。

	製品名	製品番号
1	Detax 3D Print スプリント用材料	Freeprint ortho UV 03989
2	Detax 3D Print スプリント用材料	Freeprint ortho 405 03988
3	Detax 3D Print スプリント用材料	Freeprint splint UV 03709
4	Detax 3D Print スプリント用材料	Freeprint splint 405 03066
5	Detax 3D Print スプリント用材料	Freeprint splint 2.0 385 1kg 02076
6	Detax 3D Print スプリント用材料	Freeprint splint 2.0 385 0.5kg 02080

**【貯蔵・保管方法および使用期間等】**

本品は、高温多湿を避け、暗所で保管すること。  
本品は、歯科医療関係者以外が触れないように適切に保管・管理すること。

**【包装】**

1本袋

**【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称及び住所等】**

製造販売業者：コアフロント株式会社  
〒162-0845 東京都新宿区市谷本村町2-11  
TEL：03 (5579) 8710

製造業者：Detax GmbH & Co. KG  
国名：ドイツ

**【使用目的、効能又は効果】**

本品は、歯科用咬合スプリントを作製するために用いる材料である。  
ただし、使用期間が30日を超えないものに限る。

**【性能及び安全性に関する規格】**

目視	液体状態で異物が入っていないこと
----	------------------

**【操作方法又は使用方法等】**

- ・本品は、歯科用咬合スプリントを作製するために用いる材料である。  
光で重合する性質を利用し、3Dプリンターにて造形する。
- ・具体的使用方法はマニュアルをご参照ください。

**【使用上の注意】**

**1. 重要な基本的注意**

- ・本品の使用に際しては、歯科技術に熟練し、かつ製品特性を十分に理解した歯科医師、歯科技工士、歯科関係者以外は使用しないこと。
- ・本品は、記載の使用目的以外には使用しないこと。