

2021 年 7 月 29 日（新様式第 2 版）

医療機器製造販売届出番号：13B1X10100000085

歯 08 歯科用石こう及び石こう製品
一般医療機器 歯科用樹脂系模型材 34811000
Rapidshape 3D Print 材料 添付文書

【警告】

歯科医師、歯科技工士、歯科関係者以外は使用しないこと。

【形状・構造及び原理等】

概要

本品は、歯科用模型等を作る樹脂系材料である。

本品は以下の構成から成る。

単位：g

容量	製品名	製品番号
60g × 10	D10+ capsule box RS Master Model Beige	RS001511
60g × 10	D10+ capsule box RS Master Model Grey	RS001512
60g × 10	D10+ capsule box RS Master Model Ortho	RS001514
60g × 10	D10+ capsule box RS Impression Tray	RS001517
60g × 10	D10+ capsule box RS Try-In	RS001518
25g × 10	D10+ capsule box RS Gingiva Mask	RS001515
38g × 10	D10+ capsule box RS Surgical Guide	RS001516
20g × 10	x10+ capsule box GC Temp PRINT light	RS001628
20g × 10	x10+ capsule box GC Temp PRINT medium	RS001629
38g × 10	D10+ capsule box RS IBT	RS001711
200g	D20+ cartridge RS Master Model Beige	RS001522
200g	D20+ cartridge RS Master Model Grey	RS001523
200g	D20+ cartridge RS Master Model Ortho	RS001712
200g	D20+ cartridge RS Impression Tray	RS001527
100g	D20+ cartridge RS Try-In	RS001521
100g	D20+ cartridge RS Gingiva Mask	RS001520
200g	D20+ cartridge RS Surgical Guide	RS001526
200g	D20+ cartridge RS IBT	RS001713
200g	D20+ cartridge RS Cast	RS001714
200g	D20+ cartridge RS Cast Press Ceramic	RS001715
200g	D20+ cartridge RS Denture Base	RS001716
200g	SHERAprint 20 cartridge SHERAprint Model uv smoky white	RS001689
200g	SHERAprint 20 cartridge SHERAprint Easy Base	RS001690
200g	SHERAprint 20 cartridge SHERAprint Cast & Press	RS001691
1,000g	RS Master Model Beige	RS001528
1,000g	RS Master Model Grey	RS001529
1,000g	RS Model Ortho	RS001721
1,000g	RS Impression Tray	RS001534
1,000g	RS Try In	RS001535
1,000g	RS Gingiva Mask	RS001532

1,000g	RS Surgical Guide	RS001533
1,000g	RS Crown Semi Permanent Light	RS001724
1,000g	RS Crown Semi Permanent Medium	RS001725
1,000g	RS Crown Semi Permanent Dark	RS001726
1,000g	RS Ortho Plus	RS001727
1,000g	RS Indirect Bonding Tray	RS001728
1,000g	RS Cast	RS001530
1,000g	RS Cast Press Ceramic	RS001531
1,000g	RS Denture Base	RS001729

【使用目的、効能又は効果】

本品は、歯科用模型等を作る樹脂系材料である。

【性能及び安全性に関する規格】

目視	液体状態で異物が入っていないこと
----	------------------

【操作方法又は使用方法等】

- ・本品は、歯科用模型等を作る樹脂系材料である。光で重合する性質を利用し、3D プリンターにて造形する。
- ・具体的使用方法はマニュアルをご参照ください。

【使用上の注意】

1. 重要な基本的注意
- ・本品の使用に際しては、歯科技術に熟練し、かつ製品特性を十分に理解した歯科医師、歯科技工士、歯科関係者以外は使用しないこと。
 - ・本品は口腔内には使用しないこと。

【貯蔵・保管方法および使用期間等】

本品は、高温多湿を避け、暗所で保管すること。
本品は、歯科医療関係者以外が触れないように適切に保管・管理すること。

【包装】

1 本/袋, 10 本/袋

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称及び住所等】

製造販売業者：コアフロント株式会社
〒162-0845 東京都新宿区市谷本村町 2-11
TEL：03（5579）8710

製造業者：Rapidshape GmbH
国名：ドイツ