

機械器具(54)医療用捲綿子  
一般医療機器 医科用捲綿子 10172000

## ファブリックスワブ

型式:NWF

再使用禁止

### 【禁忌・禁止】

再使用禁止

### 【貯蔵・保管方法及び使用期限等】

貯蔵方法: 高温・多湿・直射日光を避けて室温保存  
有効期間: 3年間 [自己認証(当社データ)による]

### 【形状・構造及び原理等】

本製品は、プラスチック軸の片側先端部にポリエチレンテレフタレート繊維が付いた綿棒である。(滅菌済み)



軸の材質 : プラスチック(ポリプロピレン)  
綿球の材質 : ポリエチレンテレフタレート  
綿棒全長 : 152mm±2  
綿球の太さ : 3mm±0.2

### 【包装】

120本/箱  
100本/箱  
50本/箱

### 【製造販売業者及び製造業者の名称及び住所等】

製造販売業者 広陵化学工業株式会社  
奈良県北葛城郡広陵町大字中167番地  
TEL 0745-57-0011  
FAX 0745-57-0015

製造業者 広陵化学工業株式会社 五條工場  
奈良県五條市住川町1312番地  
テクノパークなら工業団地  
TEL 0747-26-3311  
FAX 0747-26-3315

### 【使用目的、効能又は効果】

本製品は、検査のための試料を採取する器具である

### 【品目仕様等】

エチレンオキシドガス滅菌品  
無菌性保証水準(SAL):  $10^{-6}$

### 【操作方法又は使用方法等】

個包装袋の開封口からフィルムを剥がし、綿球部分を汚染しないようにプラスチック軸を持って取り出し、検体を採取する。

### 【使用上の注意】

1. 本品による検体採取は、十分習熟した人の指示のもとに実施すること。
2. 本品は包装後滅菌済みですので、包装に破れやピンホール等があった場合には使用しないこと。
3. 検体を採取する時は、力を入れすぎたり、強く押したりして本品の軸を折らないよう注意すること。
4. 本品に汚れ、破損、折れ、曲がり等があった場合には使用しないこと。
5. 本品は使用目的以外には使用しないこと。
6. 検体を採取するときは、検体採取する粘膜等の部位を傷つけないように、無理な力をかけないこと。
7. 包装を開封した時は、速やかに使用すること。
8. 使用後は速やかに滅菌処理してから廃棄すること。廃棄の際は、医療廃棄物等に関する規定等の各種規則に従い、各施設の責任において処理すること。