

医療用品 4 整形用品  
一般医療機器 綿状創傷被覆・保護材 11751000

### かきむしり防止の皮膚ガード

#### 【禁忌・禁止】

- 1) 同一患者に使用(再使用可能)し、複数の患者に使用しないこと。[感染の恐れが有るため。]
- 2) 傷口に直接触れないこと。[未滅菌のため。]

#### 【形状・構造及び原理等】

##### 1. 種類・規格

- ・ 上肢用
- ・ 下肢用
- ・ 体幹用

##### 2. 形状・構造

本品は創傷、熱傷に使用するガーゼ等の被覆保護及び滲出液の吸収を目的とした創傷被覆保護材である。種々の加工法により成型された円筒状をした形状であり、装着部に編み上げた糸の弾力により、密着性を向上させガーゼ等を安定させる。

##### 3. 種類及び色

種類：・上肢用・下肢用・体幹用  
カラー：白

##### 4. 組成

原材料：ポリエステル・ナイロン・ポリウレタン

#### 【使用目的又は効果】

創傷、熱傷等の被覆保護及び滲出液の吸収

#### 【使用方法等】

##### 1. 着用前

- 1) 本品被覆部を清拭、洗浄し、必要に応じて消毒を行います。
- 2) 創周囲を十分に乾燥させます。

##### 2. 着用方法

- 1) ガーゼ等滅菌されたパッドを創面に被せその上から本品を覆うように使用します。
- 2) 滲出液が多い場合は、本品を重ねても使用できます。

##### 3. 交換

- 1) 滲出液の量と創の状態を考慮し、必要に応じて交換します。
- 2) 皮膚を押さえながら本品をゆっくりとめくります。
- 3) 本品が皮膚に固着しているときは、蒸留水または生理食塩水で固着した部分を湿らせ柔らかくしてから剥がします。

#### 【使用上の注意】

##### 1. 使用注意 (次の患者には慎重に適用すること)

- 1) 本品使用中に発赤、びらん、そう痒等の皮膚障害と思われる症状が現れた場合は、本品の使用を中止し、適切な処置を行うこと。
- 2) 創面に臨床的感染、又はその恐れが有る場合は、頻繁に観し、適切な処置を行うこと。また、全身状態が悪い場合は特に注意して使うこと。[症状を悪化させる恐れが有る]

##### 2. 不具合・有害事象

- 一般的な創傷被覆・保護材の使用における「不具合・有害事象」
- ・ 創の感染症状
  - ・ 創傷及び周囲の皮膚障害(皮膚剥離、侵軟、浮腫、水泡、発赤、びらん、そう痒、アレルギー、接触性皮炎)
  - ・ 固着
  - ・ 壊死組織の増加
  - ・ 疼痛

##### 3. その他の注意

- 1) 包装が破損している場合には使用しないこと。

#### 【保管方法及び有効期間等】

直射日光及び火気をさけ、湿気の少ない清潔な場所に保管すること。また、包装にキズや破れが生じないように、保管に注意すること。

#### 【保守・点検に係る事項】

本品を使用後保管する場合及び使用中交換し、再度使用する場合は必ず洗濯して使用すること。洗濯の方法は市販の洗剤を使用し、着け置き洗い及び洗濯機を使用し、すぎは丁寧に行うこと。乾燥の際は本品のしわを伸ばし、陰干しする事。その他の注意については、下記の洗濯表示を参照の事。



※洗濯ネット使用、裏返しにして洗う

※上記以外での洗濯は著しい収縮を招き本来の機能を失いますので指定の洗濯を行ってください。

#### 【包装】

2枚入り/袋

#### 【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称及び住所等】

製造販売元：株式会社コーポレーションパールスター  
 第三種 医療機器製造販売業許可番号 34B3X10008  
 医療機器製造業登録番号 34BZ200022  
 〒739-2402  
 広島県東広島市安芸津町三津4424番地  
 TEL 0846-45-0116  
 Fax 0846-45-0150  
 Email parlstar@pastel.ocn.ne.jp