

機械器具12理学診療用器具

一般医療機器 弾性ストッキング 31724000

ウイストレッグサポーター

【警告】

- 以下の患者には予想されるリスクを勘案して、治療効果がリスクを上回ると判断した上で慎重に使用してください。
 - 動脈血行障害、うっ血性心不全及び装着部位に炎症性疾患、化膿性疾患、創傷のある患者。[圧迫により症状が悪化するおそれがあるため。]
 - 装着部位に神経障害のある患者。[血行障害を起こしても認識できないおそれがあるため。]
 - 糖尿病患者。[無症状の神経障害や血行障害を併発しているおそれがあるため。]
 - 繊維に対して過敏症のある患者。[接触性皮膚炎を起こすおそれがあるため。]
- 使用方法
就寝時の使用については、医師にご相談ください。[臥位になることで静脈循環等に変化が起こり、患者によっては必要以上の圧迫圧がかかるおそれがあるため。]

【禁忌・禁止】

- 重度の血行障害、うっ血性心不全及び有痛性青股腫の患者。[圧迫により症状を悪化させる危険性が高いため。]
- 感染性静脈炎の患者。
[深部静脈への感染を引き起こすおそれがあるため。]
- 装着部位に極度の変形を有する患者。[適切な圧迫圧が得られないため。]
- 深部静脈血栓症の患者で、本品を装着すると肺血栓症を起こす可能性のある患者。[使用前から血栓を有している圧迫により、血栓が肺に至るおそれがあるため。]
- サイズ表範囲内に無い患者。[各部位に過剰、過少な着圧がかかることとなり、本品の効果が発揮されないおそれがあるため。]

【形状、構造及び原理等】

1. 概要

本品は糸が筒状に成型された形状のストッキングである。編み上げた糸の弾力により同心性の圧迫力を加えるとともに、末梢部から中枢に向かって圧迫力が漸減する構造になっている。圧迫力は足首圧を最大として、中枢に向かって徐々に漸減的な圧勾配を有する。

2. 組成

ポリエステル、ポリウレタン、ナイロン


3. 製品の種類及びサイズ

種類：ヒザ下から足首まで


カラー：グレー、ブラック

サイズ：S-M、M-L

機能を発揮するにはご自分に合ったサイズをお選びください。

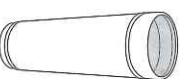

サイズ	S-M	M-L
ふくらはぎ部	27～43cm	33～49cm
足首部	15～26cm	20～31cm

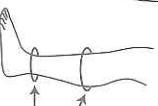

【使用目的又は効果】

下肢の静脈血、リンパ液のうっ滞を軽減又は予防する等、静脈還流の促進を目的に使用される医療用の弾性ストッキングである。末梢から中枢に向かい漸減的に圧迫を加える機能を有する。

【品目仕様等】

本品は、着用することにより適用範囲内の人に対して、足首部の圧迫圧が最大でふくらはぎ部は中枢に向かい漸減的に低い圧迫力を得ることができる。

【使用方法等】

〈着用法〉

上
(履き口)



①サポーターの上下、外側・内側を確認します。




上下、外側・内側を間違わないように注意してください。




上下逆に着用 裏返して着用




②履き口を広げ足先を入れます。

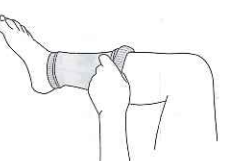

③足首まで履かせます

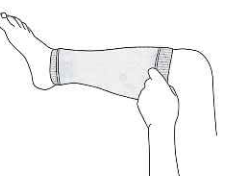

④履き口を膝下まで引き上げます。

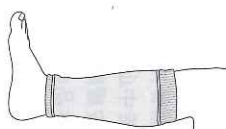

⑤全体を整えます。