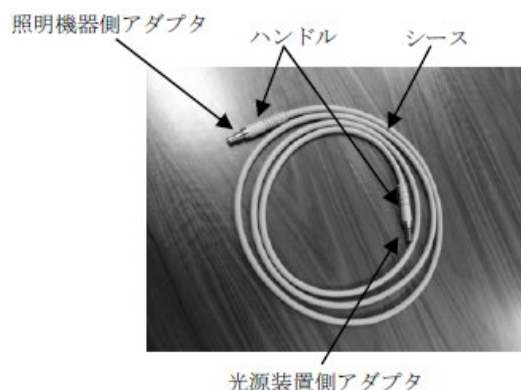


機械器具 25 医療用鏡
一般医療機器 内視鏡用部品アダプタ JMDN コード:37090010
VIKING 3DHD ライトガイド

【形状、構造及び原理等】

本品は、光源装置が発する光を内視鏡等の照明機器へ伝送する光ファイバケーブルである。

[各部名称]

**【使用目的又は効果】**

本品は、光源装置が発する光を内視鏡等の照明機器へ伝送する光ファイバケーブルである。

【使用方法等】

1. 使用前に、適切な方法で消毒、滅菌を行う。
2. 光源装置側アダプタを光源装置の適合するケーブルポートに、照明機器側アダプタを内視鏡の適合するケーブルポートにそれぞれ接続する。必要に応じてアダプタを接続し、光源装置及び内視鏡に接続する。
3. 使用後は、接続した機器から本品を取り外し、適切な方法で清拭、洗浄、消毒及び滅菌を行う。

【使用上の注意】

[重要な基本的注意]

- ・ 光を直視しないこと。
- ・ 接続された照明機器を患者の組織や可燃性物質の近辺に放置しないこと [出力される光はエネルギー密度が高いため、患者組織が損傷したり、可燃性物質が発火する恐れがある。]
- ・ 使用中、光源装置や内視鏡との接続部に使用されている金属部は熱くなるため、光源装置の出力をオフにした後、十分に冷却されるまで直接触れないこと。
- ・ 本品を過度に曲げないこと。内部の光ファイバが破損する恐れがある。
- ・ ケーブル本体部の被膜に傷がついた場合は、ただちに使用を中止すること。
- ・ 光学面を床面や固いものに接触させないこと。傷がついた場合、光量が減少する恐れがある。

【保管方法及び有効期間等】

水漏れに注意し、直射日光及び高温多湿を避けて保管すること。

【保守・点検に係る事項】

[使用者による保守点検事項]

1. 使用前後に製品の点検を行う。
2. 中性洗剤を含んだ温水で本品の表面上の汚れを洗い流す。この時、合成洗剤や石油系石鹼は使用しないこと。ケーブル皮膜に浸透したこれらの化学成分が手技中に漏れ出して、患者や術者の組織と反応する恐れがある。
3. 洗浄後、本品を蒸留水ですすぎ、注意深く完全に乾燥させる。すすぎの際、ケーブル両端の光ファイバ表面を注意してすすぐこと。

4. 本品はオートクレーブを用いた高圧蒸気滅菌が可能である。

[推奨滅菌条件]

サイクル	温度	暴露時間
Prevacuum	132℃	4 分間

5. 滅菌後、本品を室温まで自然冷却する。この時、冷水等で急速に冷却しないこと。

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

製造販売業者：コンメッド・ジャパン会社

外国製造業者：ConMed Corporation French Road Facility

国名：アメリカ合衆国