

機械器具(51) 医療用嘴管及び体液誘導管
一般医療機器
(一般医療機器)

一般的名称:吸引チューブ
一般的名称:排気用チューブ

JMDNコード:16779000
JMDNコード:70354000

Buffalo Filter チューブ 2

再使用禁止

【禁忌・禁止】

1. 使用方法
 - (1) 再使用禁止
 - (2) 再滅菌禁止

【形状・構造及び原理等】

1. 概要

本品は、吸引装置と共に用いる吸引チューブである。本品は単回使用である。単品又は組み合わせて供給される。

2. 形状(一例)

本品はラテックスフリーである。



3. 原理

本品の片端をトロッカーに、もう一端を吸引装置に接続して、手術中に発生する煙や粒状物質をフィルタでろ過して排気する。シエル内には、フィルタの詰まりを軽減するための液体トラップが内蔵されている。また、チューブの途中にある流量調節バルブで吸引量を調節する。

【使用目的又は効果】

本品は、手術で発生する煙等をろ過及び排気するために、吸引装置との接続に用いるプラスチック製のチューブである。

【使用方法等】

1. 使用方法

本品は滅菌済みの製品であるため、包装に破損及び亀裂等がないことを確認する。

本品は使い切りの製品であり、1回限りの使用で再使用できない。

手技(一例):

- 1) トロッカー接続チューブをトロッカーに接続し、吸引装置接続チューブを吸引装置に接続する。
- 2) 流量調節バルブで吸引量を調節する。

2. 使用方法等に関する使用上の注意

- 1) 吸引圧は100mmHg～400mmHgの範囲で設定すること。
- 2) 流量調節バルブを0の位置に戻して廃棄すること。

【使用上の注意】

1. 重要な基本的注意

- 1) 吸引チューブに詰まり、閉塞、ねじれがないことを常時確認すること。

2. 不具合・有害事象

以下の不具合が発現する可能性がある。

- 1) その他の不具合
 - (1) 接続不良
 - (2) 作動不良
 - (3) 構成部品の破損、折損、損傷

【保管方法及び有効期間等】

1. 保管方法
高温、多湿、直射日光を避けて保管すること。
2. 有効期間
外箱に表示(自己認証による)

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

<製造販売業者>

コンメッド・ジャパン株式会社

<製造業者>

コンメッド社

ConMed Corporation French Road Facility

国名:アメリカ合衆国