

歯科材料 07 歯科用ワックス
一般医療機器 歯科用キャスティングワックス 16189000

CS CAD/CAM ワックスディスク

【形状・構造及び原理等】

〔種類〕

直径：φ98.5 mm

厚み：14mm, 18mm, 20mm, 25mm, 30mm



〔原理〕

歯科技工室設置型コンピュータ支援設計・製造ユニットにて
切削加工を行い、歯科鋳造物のロウ型に用いる。

【使用目的又は効果】

インレー、クラウン、ブリッジなど歯科用補綴物のロウ型の材料
に用いる。

【使用方法等】

〔使用環境条件〕

使用場所：室内

温度 / 湿度：18～30℃ / 60%以下

〔使用方法〕

CAD/CAM 加工機などを用いて加工を行い、必要に応じてマー
ジンの調整を行う。その後スプルーを植立し、鋳造を行う。

【使用上の注意】

1. 再溶解して使用しないこと。
2. 過度の加熱や、加熱したままでの放置をしないこと。
3. 石こう系埋没材を使用する場合、マージンにバリが出るこ
とがある。その場合、急速加熱を避けるか、マージンをワ
ックスで調整すること。

【保管方法及び有効期間等】

〔保管方法〕

1. 本材料は高温、多湿、直射日光を避けて保管すること。
2. 本材料の使用及び保管場所には消火装置を備えること。
3. 本材料は火気厳禁の場所に保管し、一か所での大量保管を
避けること。

〔有効期間〕

適切な条件での保管を行った場合に限り、有効期間は 5 年とす
る。

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称及び住所等】

〔製造販売業者〕

コスモサイン合同会社

東京都品川区荏原 1-8-8 坂本ビル 1 階

電話番号：03-6426-9935

〔製造業者〕

アイダイテ（チンホワンタオ）テクノロジー

カンパニーリミテッド

A i d i t e (Q i n h u a n g d a o)

T e c h n o l o g y C o., L t d.

国名：中国