

機械器具 54 医療用捲綿子
一般医療機器 医療用捲綿子 10172000

販売名: FLOQ スワブ5U060S01

再使用禁止

【禁忌・禁止】

- ・再使用禁止

【形状・構造及び原理等】

1. 形状・構造

本品は、ナイロン製の軸の先端部にポリアミド製の繊維を取り付けた綿棒である。

材質 綿球 : ポリアミド (淡黄色)
軸 : ナイロン (白色半透明)

寸法 綿棒全長: 151mm 軸最大径: 4.4mm
綿球長 : 16mm 綿球直径: 5.5mm

外観図



2. 滅菌・個包装袋等

本品は個包装袋とともに滅菌済みです。

【使用目的又は効果】

本品は、検査のための試料を採取する器具である。主に咽頭からの検体採取に適している。

【使用方法等】

個々の包装袋の開封口よりフィルムをはがし、綿球部分に触れないように、本品の軸部分を持って取り出し、そのまま検体の採取に使用する。



必ず「PEEL HERE」と書かれた側から開封してください。

- 7) 本品の使用後の廃棄にあたっては、滅菌処理を行い、関連する法律や規定に従って処分してください。

【保管方法及び有効期間等】

1. 保管方法

2～30℃で、濡れに注意して、直射日光、多湿、凍結を避けて保管してください。

2. 使用期限

外箱及び個包装袋に、製造番号とともに記載してあります。

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

製造販売業者

コパンジャパン株式会社

電話番号 078-599-9460

外国製造業者 (国名)

COPAN ITALIA S. p. A.

コパンイタリア社 (イタリア)

【使用上の注意】

- 1) 本品は滅菌済みですので、個々のパウチに破損や汚染の疑いがある場合は使用しないでください。また、開封後は、速やかに検体採取を行ってください。
- 2) 本品に破損や折れ曲がり、汚れ等があった場合は使用しないでください。
- 3) 検体採取時、軸部分に力がかかり過ぎる、強く押す、過度の振れ負荷がかかるような使い方はしないでください。[軸が折れる可能性があるため]。また、軸を曲げる、反らす、折る等の意図的な変形を加えないでください。
- 4) 挿入部位において、あきらかに通常より挿入距離が短い位置で軸に強い抵抗を感知する等の場合には、挿入操作を続けないでください。
- 5) 臨床検体の取扱いの場合、感染の危険性があるものとして、保護具（眼鏡、手袋、マスク等）を着用のうえ、十分に注意して操作を行ってください。
- 6) 二次感染を防止するために、開封後の個包装袋は検体採取後の本品の輸送には使用しないでください。