

機械器具 54 医療用捲綿子
一般医療機器 医療用捲綿子 10172000

販売名：FLOQスワブ・チューブタイプ

再使用禁止

【禁忌・禁止】

- ・再使用禁止

*【形状・構造及び原理等】

1. 形状・構造

本品は、プラスチック製の軸の先端部にナイロン製の繊維を取り付けた綿棒である。
検体輸送用の外装チューブ内に収められており、検体採取後は外装チューブに収納し輸送することができる。軸を折るためのブレイクポイントが設けられているものもある。



(外装チューブに収められた状態の例)

- ・ FLOQ スワブ 519C (汎用)



- ・ FLOQ スワブ 552C (汎用)



- ・ FLOQ スワブ 552C.80 (主に膣)



- ・ FLOQ スワブ 552C.80PB (主に膣)



- ・ FLOQ スワブ 520C (主に鼻腔、咽頭、鼠径部、腋窩、頬粘膜、糞便)




- ・ FLOQ スワブ 5U085S (汎用)



- ・ FLOQ スワブ 5E046S (主に膣)



- ・ FLOQ スワブ 52980C (主に子宮頸管及び外子宮頸部、膣)

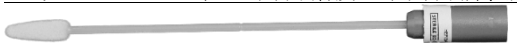

- ・ FLOQ スワブ 553C (主に鼻咽頭)



- ・ FLOQ スワブ 516C (主に新生児)



- ・ FLOQ スワブ 560C (主に尿道)



寸法 (単位: mm)

コード	綿棒全長	軸直径	綿球長	綿球直径	BP※
519C	151.0	2.5	16.0	5.5	98.7
552C	151.0	2.5	16.0	5.5	78.5
552C.80	151.0	2.5	16.0	5.5	78.5
552C.80PB	151.0	2.5	16.0	5.5	78.5
520C	151.0	1.8	16.0	5.5	29.0
5U085S	151.0	2.5	16.0	5.5	-
5E046S	148.5	2.5	22.0	7.0	-
52980C	148.0	2.5	22.0	7.0	78.5
553C	152.0	2.5	16.0	3.5	98.5

516C	152.0	2.5	8.0	3.5	98.5
560C	151.0	2.5	20.0	3.0	78.5

※BP:ブレイクポイント (綿球先端からの距離)

2. 材質

綿球: ナイロン (淡黄色)

軸: ポリスチレン、ナイロン又はコポリエステル

3. 滅菌・個包装袋等



本品は外装チューブとともに滅菌済みです。

【使用目的又は効果】



本品は、検査のための試料を採取する器具である。

【使用方法等】

- 1) 下図のように、キャップを開け、キャップを持ってスワブを取り出します。
- 2) そのまま検体の採取に使用してください。検体採取中は汚染のリスクを避けるため、綿球部分は検体以外に触れないようにしてください。

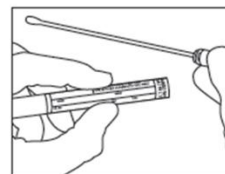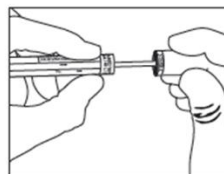

- 3) 検体を採取した後、下図のように、スワブを輸送用の外装チューブに挿入し、しっかりとキャップをしてください。
- 4) 必要に応じて、採取検体に関する情報をチューブのラベルに記載します。

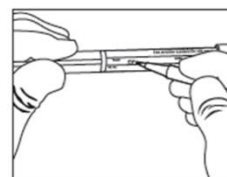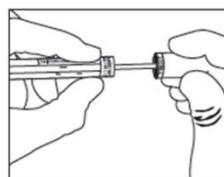

【使用上の注意】

- 1) 本品は滅菌済みですので、個々の外装チューブに破損や汚染の疑いがある場合は使用しないでください。また、開封後は、速やかに検体採取を行ってください。
- 2) 本品に破損や折れ曲がり、部分的な白化、汚れ等があった場合は使用しないでください。
- 3) 検体採取時、軸部分 (特に軸の細い部分) に力がかかり過ぎる、強く押す、過度の振れ負荷がかかるような使い方はしないでください。[軸が折れる可能性があるため]。また、軸を曲げる、反らす、折る等の意図的な変形を加えないでください。
- 4) 挿入部位において、あきらかに通常より挿入距離が短い位置で軸に強い抵抗を感知する等の場合には、挿入操作を続けしないでください。
- 5) 臨床検体の取扱いの場合、感染の危険性があるものとして、保護具 (眼鏡、手袋、マスク等) を着用のうえ、充分に注意して操作を行ってください。

- 6) 本品の使用後の廃棄にあたっては、滅菌処理を行い、関連する法律や規定に従って処分してください。

【保管方法及び有効期間等】

1. 保管方法
2～30℃で、濡れに注意して、直射日光、多湿、凍結を避けて保管してください。
2. 使用期限
外箱及び個包装袋に、製造番号とともに記載してあります。

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

製造販売業者

コパンジャパン株式会社

電話番号 078-599-9460

外国製造業者（国名）

COPAN ITALIA S.p.A.

コパンイタリア社（イタリア）