

機械器具 54 医療用捲綿子
一般医療機器 医療用捲綿子 10172000

販売名：コパン LolliSponge

再使用禁止

【禁忌・禁止】

- ・再使用禁止

【形状・構造及び原理等】

1. 形状・構造

本品は、ポリスチレン製の軸の先端部にポリウレタン製のスポンジを取り付けた綿棒である。
検体輸送用の外装チューブ内に収められおり、検体採取後は外装チューブに収納し輸送することができる。
本品は未滅菌である。



(外装チューブに収められた状態)

- ・ Lolli スポンジ 1E063N01



寸法（単位：mm）

コード	綿棒全長	軸直径	スポンジ部長さ
1E063N01	81.0	2.5	24.2

2. 材質

スポンジ：ポリウレタン
軸：ポリスチレン

【使用目的又は効果】

本品は、検査のための試料を採取する器具である。唾液採取に適している。

【使用方法等】

- ※ 飲食、喫煙又は歯磨き後 30 分以内は検体採取を行わないでください。
- 1) 袋を開け、本品を取り出します。
 - 2) 唾液を舌上に約 10 秒間ためます。
 - 3) キャップを持ってチューブを開封し、スポンジ部を口腔内に挿入します。
 - 4) スポンジ部を舌で軽く押しながら、約 60 秒間口腔内に保持し、唾液を吸収させます。
 - 5) 採取後、本品をチューブ内に戻し、キャップを確実に閉めます。

【使用上の注意】

- 1) 個包装袋に破損や汚染の疑いがある場合は使用しないでください。また、開封後は速やかに検体採取を行ってください。
- 2) 本品に破損、変形、汚れ等が認められる場合は使用しないでください。
- 3) 検体採取時はスポンジ部を手で触れないでください。
- 4) 検体採取時に過度な力を加えないでください。また、スポンジ部を噛まないでください。
- 5) スポンジ付き軸をキャップから取り外さないでください。
- 6) 本品が開封後に落下した場合、又は口腔以外の表面に接触した場合は使用しないでください。
- 7) 臨床検体の取扱いの場合、感染の危険性があるものとして、保護具（眼鏡、手袋、マスク等）を着用のうえ、十分注意して操作を行ってください。

作を行ってください。

- 8) 本品の使用後の廃棄にあたっては、関連する法律や規定に従って処分してください。

【保管方法及び有効期間等】

1. 保管方法

2～25℃で、濡れに注意して、直射日光、多湿、凍結を避けて保管してください。

2. 使用期限

外箱及び個包装袋に、製造番号とともに記載してあります。

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

製造販売業者

コパンジャパン株式会社

電話番号 078-599-9460

外国製造業者（国名）

COPAN ITALIA S.p.A.

コパンイタリア社（イタリア）