

機械器具 80 はり又はきゅう用器具
管理医療機器(滅菌済み鍼) JMDNコード 34175000

イーハリ ディスポ鍼

再使用禁止


【禁忌・禁止】

- 再使用禁止
- 刺入の深さは、しん(鍼)体の長さの 1/3 以上を残して刺入して下さい。No. 01(線径 0.14 mm)以下の鍼を使用する場合は、しん(鍼)体の長さの 1/2 以上を残して刺入して下さい。

【原則禁忌】

以下の方には使用しないで下さい。ステンレス成分に対する金属アレルギーのある方、妊婦、救急事態にあり手術を必要とする方、悪性腫瘍のある方、出血性疾患のある方。その他、医師が不適当と判断した方。

【形状、構造及び原理等】

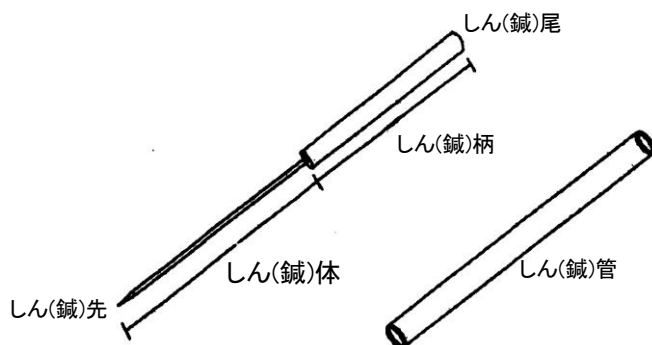

しん(鍼)柄は金属やプラスチックで作られる。しん(鍼)体はステンレス鋼線で作られる。プラスチック製のしん(鍼)管(ガイドチューブ)が付属するものもある。しん(鍼)体表面に潤滑剤として潤滑油(シリコーン油)を施す。

種類及び寸法表

JP, B, NRJ, NJJ, CJ タイプ

番号/呼称	線径(mm)	鍼柄の色/ ラベルの色	15mm (5分)	30mm (1寸)	40mm (寸3)	50mm (寸6)	60mm (2寸)
03 番 No. 03	0.10	ホワイト	*1015				
02 番 No. 02	0.12	ダークグリーン	*1215	*1230	*1240		
01 番 No. 01	0.14	ライトグリーン	*1415	*1430	*1440	*1450	*1460
1 番 No. 1	0.16	レッド	1615	1630	1640	*1650	*1660
2 番 No. 2	0.18	アイボリー	1815	1830	1840	*1850	*1860
3 番 No. 3	0.20	ブルー	2015	2030	2040	2050	*2060
4 番 No. 4	0.22	ピンク	*2215	2230	2240	2250	*2260
5 番 No. 5	0.25	パープル	2515	2530	2540	2550	*2560
8 番 No. 8	0.30	ブラウン		3030	3040	3050	*3060

タイプによっては上記の*印の製品が無い場合がございます。NRJ タイプの 2275 と CJ タイプの 2275、2575、3075、25100、30100 については特注に応じることが可能です。

線径の許容差

単位: mm


線径	許容差
0.10-0.20	±0.006
0.22-0.30	±0.008

【使用目的又は効果】

鍼治療に使用すること。

【使用方法等】

1. 患者の鍼灸処方や刺入部位によって、適切なサイズの鍼を選択する。
2. 個別包装から鍼を取り出し、適切なつぼに施術する。
3. 使用方法

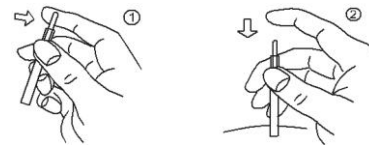

① 図のように親指と中指でしん(鍼)管を回しながら、人差し指でしん(鍼)柄に力を加えると、しん(鍼)体はしん(鍼)管を離れます。

② 片手で皮膚に刺鍼します。刺入の際、しん(鍼)体長の 1/3 以上は残して下さい。

【使用上の注意】

- 包装を開封したら、直ちに使用すること。
- 個別包装に破損がある場合は、使用しないこと。
- 使用期限の過ぎた鍼は、使用しないこと。
- 灸頭鍼として使用する場合は、やけどに注意すること。
- 使用後は感染防止に留意し、安全な方法で処分すること。
- 水濡れ、直射日光および高温多湿を避けて保管すること。

【保管方法及び有効期間等】

〈保管方法〉

水ぬれ、直射日光および高温多湿を避けて保管すること。

〈有効期間〉

箱の使用期限欄を参照すること。(自己認証による)

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】製造販売業者:

神戸鍼灸針株式会社

製造業者: Maanshan Bond Medical Instruments Co., Ltd.(中国)