

モ ラ ラ

【警告】

・本品の使用により、体質や体調によって、トキシックショック症候群(Toxic Shock Syndrome：TSS)が発生する可能性があります。発疹・発赤、倦怠感、嘔吐、下痢、血圧低下、粘膜充血などのような症状が発生した場合、本品の使用を中止し、この添付文書を持って産婦人科などの専門医を受診してください。TSSとは：黄色ブドウ球菌の産生する毒素が原因で起こる急性疾患です。黄色ブドウ球菌は鼻腔・皮膚・頭髮・脇の下・陰毛・膣などにも存在し、月経ディスクの使用の有無に関係なく、切り傷や火傷などによっても発症する可能性があります。ごくまれに死に至る重篤な症状を引き起こす可能性もあります。使用に際しては、手指が清潔でなかったり、長時間使用や、取り出し忘れなどにより、黄色ブドウ球菌が増殖し、毒素を産生しやすくなるといわれています。この文書に従って使用することで、TSS発症の可能性を軽減することができると考えられます。

・TSSの発症の可能性を軽減するために、次のことを守ってください。

①本品の使用は12時間を超えないでください。

②12時間を超えるような就寝の場合には使用しないでください。

【禁忌・禁止】

1) 再使用禁止

2) 過去にTSSを発症したことがある人は、使用しないでください。


3) 分泌物（おりもの）に異臭がある人は、使用しないでください。

4) 膣内や膣口に痛みやかゆみがある場合や、排尿時に不快感がある場合は、使用を中止し医師に相談してください。

5) 本品は避妊具ではありませんので、STD（性感染症）や妊娠を防止することはできません。

【形状・構造及び原理等】

1. 本品は 月経若しくは他の膣分泌物を回収するために膣に挿入するエラストマーとポリエチフィルム でできたディスク状の詰め物です。
2. 本品は リム部とフィルム部により構成されています。
3. 本品は滅菌品です。

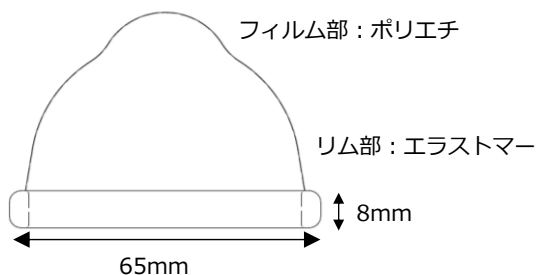

【使用目的又は効果】

本品は月経若しくは他の膣分泌物を回収するために、膣内へ挿入し配置します。

【使用方法等】

①挿入方法

1. 挿入前に手指をよく洗い清潔にします。
2. フィルム側が下になるように本品を持ち、リム部分を親指と人差し指で掴み細長い形にします。
3. 細長い形にしたまま本品を持ち、人差し指で本品を押し込み、膣内に挿入します。なお、本品を挿入する際は、トイレ又は風呂場で挿入してください。
4. 子宮頸部の後ろの位置まで挿入したらリム部を押し上げ配置します。



②取り出し方

1. 取り出し前に手指をよく洗い清潔にします。
2. トイレに座るか片足を上げた状態で恥骨に向かって指を挿入します。
3. 指をリムに引っ掛けて、経血が漏れないように水平に引き出します。
4. 取り出した本品に溜まった経血をトイレや排水溝に流してください。

③廃棄

取り出した本品は必ず捨ててください。

【使用上の注意】

1. 万一、個包装ですが破損している場合は使用しないでください。
2. 滅菌済製品ですが、外箱の開封後は速やかにご使用ください。
3. 産後8週間まで又は、産後初めての生理時は使用をお控えください。
4. 子宮内避妊具（IUD）を使用している場合は、本品の使用については医師と相談すること。まれに月経ディスクを取り出す際にIUDストリングを引っ張ってIUDが外れたり、移動したりするリスクがあります。
5. 万一取り出せなくなった時は、すぐに産婦人科などで取り出してもらってください。
6. 廃棄に関しては、お住まいの自治体の指示に従って処理してください。
7. ご使用前にこの添付文書を読んで、正しくお使いください。

【保管方法及び使用時間等】

〈保管方法〉

水ぬれ、温度や湿度の高いところ、直射日光のあたるところをさけて箱に入れて衛生的に保管してください。

また、香料、薬品、洗剤などと一緒に保管しないでください。

〈使用時間〉

最大着用時間は8～12時間です。

【製造販売元】

ゴムノイナキ 株式会社

愛知県名古屋市長区大高町奥中道41番地

【販売元】

株式会社MONA company