

＊＊2024年7月（第3版）

医療機器認証番号 21400BZY00374000

＊2019年8月（第2版）

機械器具 12 理学診療用器具

管理医療機器

人体開口部用超音波プローブカバー（70015000）

プローブフィット

再使用禁止


【警告】

本品は天然ゴムラテックス製である。
天然ゴムは、かゆみ、発赤、蕁麻疹、むくみ、発熱、呼吸困難、喘息様症状、血圧低下、ショック等のアレルギー性症状をまれに起こすことがある。このような症状を起こした場合には、直ちに使用を中止し、医師に相談すること。

＊【禁忌・禁止】

- ・再使用禁止
- ・医薬品、油脂性成分及び揮発性薬品との接触禁止

＊【形状・構造及び原理等】

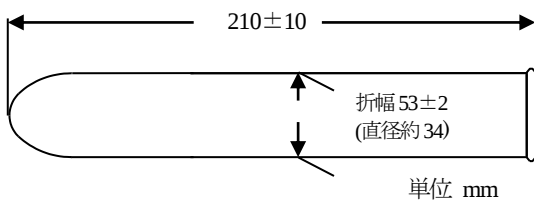

＊【使用目的又は効果】

経腔用又は経直腸用プローブを使用する時、患者間の感染予防及び医療従事者への感染予防、事後処理の簡略化を目的とする。

＊＊【使用方法等】

カバーにキズを付けないよう個別包装内から取り出すこと。
経腔用又は経直腸用プローブにカバーをかぶせるときは、カバーの巻上がりの表裏を確認し、カバーの裏側が経腔用又は経直腸用プローブ先端にかぶさるようにし、プローブ先端部にピッタリと密着させてプローブ根元に向かってゆっくりとほぐし、プローブの根元まできちんとかぶせること。
あらかじめカバーに潤滑剤が塗布されている場合は、そのまま患者の腔又は直腸に挿入し測定を開始すること。
カバーに潤滑剤が塗布されていない場合は、潤滑剤を塗布後、患者の腔又は直腸に挿入し測定を開始すること。
潤滑剤を塗布するに当たって、シリコンオイル又は当社の潤滑剤を使用すること。測定終了後、経腔用又は経直腸用プローブからカバーを抜き去ること。

＊＊本品は単回使用製品のため一回限りの使用とする。

＊＊【使用上の注意】

使用目的以外の使用はしないこと。
カバーにキズを付けないよう個別包装内から取り出すこと。
薬品・溶剤（ガソリン・ベンジン等）、油類を付けないこと。ゴムを傷める原因となる。
本品は天然ゴムラテックス製である。
天然ゴムは、かゆみ、発赤、蕁麻疹、むくみ、発熱、呼吸困難、喘息様症状、血圧低下、ショック等のアレルギー性症状をまれに起こすことがある。
このような症状を起こした場合には、直ちに使用を中止し、適切な措置を施すこと。
＊＊本品は単回使用製品なので、1回限りの使用のみで再使用できない。
使用期限を過ぎたプローブカバーは使用しないこと。

【保管方法及び有効期間等】

<保管方法>

- ・冷暗所に保管すること。
- ・直射日光や高温多湿の場所に保管しないこと。
- ・揮発性薬品と一緒に保管しないこと。

<有効期間>

使用期限を外箱に記載（自己認証）

＊【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

製造販売元：相模ゴム工業株式会社
住所：〒243-0002 神奈川県厚木市元町 2-1
電話番号：046-221-2311
（土・日・祝日を除く 9:00～17:00）

【発売元】

一般社団法人 日本家族計画協会
東京都渋谷区幡ヶ谷 1-34-14 宝ビル 7 階

【販売提携】

サンファーマ株式会社
東京都港区芝公園 1-7-6