

添付文書
器 25 医療用鏡
一般医療機器 歯鏡 JMDN : 31776000

リフィルミラー及び
バリアスリーブの再使用禁止

ニューミラーライト

【禁忌・禁止】（**）

- ・本体の分解・改造及びあらゆる液体への浸漬水洗い禁止。
- ・リフィルミラー部及びバリアスリーブの再使用禁止。

【形状・構造及び原理】（*）

【形状・構造】（**）



【原理】

口腔内診査又は、圧排のために用い、診察時にLEDライトを点灯させて、光量不足を補う。（**）

【包装】（**）

■スタータキット

ミラーライト本体	× 1 本
リフィルミラー	× 5 0 本
バッテリーパック（3 個）	× 6 セット
バリアスリーブ	× 5 0 枚

■リフィルミラーセット

リフィルミラー	× 5 0 本
バッテリーパック（3 個）	× 2 セット
バリアスリーブ	× 5 0 枚

【寸法】（**）

全長：180mm、ミラー部：Φ24mm（表面反射）、
本体重量：約 32 g

【使用目的又は効果】（**）

口腔内診査又は圧排のために用いる歯科用器具で、通常、ミラーヘッド及びハンドルからなるものをいう。

【使用方法等】（*）

- ・リフィルミラーを本体先端部にしっかりと差し込み、ミラー保護シートをはがす。
- ・ミラーライト本体のダイヤル部分を時計まわり右回りに回すとLEDライトが点灯する。（ライトが点灯したら、それ以上回さないこと）
- ・ライトを消す場合は、反対方向にまわす。（ライトが消えたら、それ以上回さないこと。）

【使用上の注意】

- ・本体は 121℃以下でのオートクレーブ滅菌が可能。
- ・オートクレーブ滅菌時、バッテリーは必ず本体より取り出して再びキャップをしめた後、滅菌バックに入れて滅菌すること。
- ・ミラーライト本体は、水洗いを絶対しないこと。又、薬液等による浸漬消毒は不可のため、本体が汚れた場合はガーゼなどで清拭すること。
- ・リフィルミラー・バリアスリーブはディスポーザブルのため、再使用はしないこと。
- ・バッテリーパックを交換する場合はプラス、マイナスを確認してからセットして下さい。
- ・3 個が 1 セットになっているバッテリーパックは、包装を剥がさず本体へセットすること。
- ・破損、キズ等がみられる場合は使用をしないこと。（**）

【保管方法及び有効期限等】（*）

【保管方法】（**）

- ・水ぬれに注意し、直射日光、高温や湿気の多い場所は避けて保管すること。

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】（*）

製造販売業者 (株)ビーエスエーサクライ
住 所 名古屋市天白区高島一丁目 117-1
電 話 番 号 052-805-1181
外国製造業者 クドス インターナショナル ホールディングス
リミテッド
KUDOS INTERNATIONAL
HOLDINGS LIMITED
国 名 香港