

添付文書
歯 09 歯科用研削材料
一般医療機器 歯科用研磨器材 JMDN : 70907000

ブレイジングコットン


【禁忌・禁止】

- ・破損、変形、劣化品の使用禁止。(**)

【形状・構造及び原理等】(*)

〔形状・構造〕 (***)

軸部と先端研磨部(綿)から構成される。
最高回転速度 15000rpm

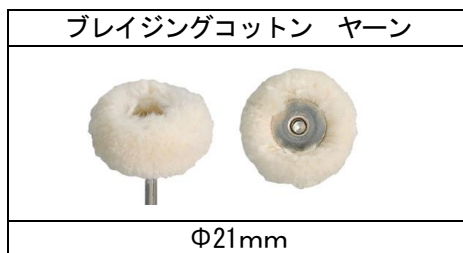

【原材料】 (***)

先端研磨部 : 綿
軸部 : 鉄(亜鉛メッキ)

【原理】 (**)

補綴物等の研磨に用いる。

【包装】

- 1箱(12本入)
- 1グロス(144本入)

【使用目的又は効果】 (**)

補綴物等の研磨に用いる器材をいう。別に名称を定めるものを除く。

【使用方法等】 (*)

ハンドピースに装着し、研磨用途に適した研磨材を本品あるいは補綴物等に塗布し、研磨する。

【使用上の注意】

- ・ハンドピースに軸部を確実に挿入し、チャックをすること。
- ・無理な角度、過度の加圧での使用は避けること。
- ・使用の際は、必ず保護メガネを使用すること。
- ・破損、変形、劣化品は使用しないこと。(**)
- ・最高回転速度を超えて使用しないこと。 (***)

【保管方法及び有効期間等】 (*)

〔保管方法〕

- ・水ぬれに注意し、高温、湿気の多い場所を避けて保管すること。
- ・歯科医療従事者以外の者が触れられない、適切な場所に保管すること。

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】 (*)

製造販売業者 (株)ピーエスエーサクライ
住所 名古屋市天白区高島1丁目117-1
TEL 052-805-1181
外国製造業者 シャンハイビット ユケンソウ
上海ラビット有限公司
国名 中国