

ブレイジングブラシ

【禁忌・禁止】

- ・破損、変形、劣化品の使用禁止。（**）

【形状・構造及び原理等】（*）

〔形状・構造〕（***）

軸部と先端研磨部（豚毛）から構成される。（**）

最高回転速度 15000rpm



No. 12	No. 11	No. 9
直径 20mm	直径 17.5mm	直径 14.5mm

軸部：鉄（亜鉛メッキ）、先端部：豚毛

〔原理〕（**）

補綴物等の研磨に用いる。

〔包装〕

■ 1 箱（12 本入）

■ 1 グロス（144 本入）

【使用目的又は効果】（***）

補綴物等の研磨に用いる器材をいう。別に名称を定めるものを除く。

【使用方法等】

ハンドピースに装着し、研磨用途に適した研磨材を本品あるいは補綴物等に塗布し、研磨する。

【使用上の注意】

- ・ハンドピースに軸部を確実に挿入し、チャックをする。
- ・無理な角度、過度の加圧での使用は避けること。
- ・使用の際は、必ず保護メガネを使用すること。
- ・歯科医療従事者のみの使用に限られ、歯科用目的以外に使用しないこと。
- ・破損、変形、劣化品は使用しないこと。（**）
- ・最高回転速度を超えて使用しないこと。（***）

【保管方法及び有効期間等】

〔保管方法〕

- ・水ぬれに注意し、高温、湿気な場所を避けて保管すること。
- ・本品は歯科従事者以外が触れない適切に保管管理すること。

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

製造販売業者 (株)ビーエスエーサクライ
住所 名古屋市天白区高島 1 丁目 117-1
電話番号 052-805-1181
外国製造業者 上海ラビット有限公司
国名 中国