

添付文書
歯 07 歯科用ワックス
一般医療機器 歯科用パラフィンワックス JMDN : 70893000

B S Aパラフィンワックス

【禁忌・禁止】

- ・火気厳禁
- ・高温の場所に保管しないこと。

【形状・構造及び原理等】

[形状・構造] (**)

ソフトタイプ

1. 形状 : 板状
2. 厚さ : 1.4mm
3. サイズ : 横 146mm×縦 73mm

ワイド ソフトタイプ

1. 形状 : 板状
2. 厚さ : 1.4mm
3. サイズ : 横 170mm×縦 85mm

ミディアムタイプ

1. 形状 : 板状
2. 厚さ : 1.4mm
3. サイズ : 横 146mm×縦 73mm

ワイド ミディアム

1. 形状 : 板状
2. 厚さ : 1.4mm
3. サイズ : 横 170mm×縦 85mm

[原理]

板状のワックスを加熱して棒状にし、基礎床に圧接する。

[物理的性質] (**)

融点 : ソフトタイプ (58℃)

ミディアムタイプ (62℃)

[包装]

1箱 (1kg)

【使用目的又は効果】(*)

主として、義歯床の仮床、人口歯の排列等に用いるワックス。

【使用方法等】(*)

- ・板状のワックスを加熱して棒状にし、棒状になったワックスを馬蹄形にして基礎床に圧接する。
- ・過不足部分は盛ったり、足したり、削ったりし基礎床に圧接する。

【使用上の注意】

- ・本材は可燃性である為、火災、火傷などに注意すること。
- ・歯科医療及技工資格者のみの使用に限られ、歯科用目的以外に使用しないこと。

【保管方法及び有効期間等】*

[保管方法] (**)

- ・通気性のよい、汚染を受けない場所で保管すること。
- ・高温、多湿な場所を避けて保管すること。
- ・歯科医療従事者以外の者が触れない場所に保管すること。

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】(*)

製造販売業者 : (株)ビーエスエーサクライ

住 所 : 名古屋市天白区高島1丁目117-1

T E L : 052-805-1181

外国製造業者 : 上海ラビット有限公司

国 名 : 中国