

添付文書
器 25 医療用鏡
一般医療機器 歯鏡 JMDN : 31776000

ディスポンミラー

再使用禁止。

【禁忌・禁止】

- ・ 本体と先端部の分離禁止。
- ・ 再使用禁止。

【形状、構造及び原理等】(*)

〔形状・構造〕

本品は、ミラーヘッド部及び本体ハンドル部から構成される手持型器具である。



〔原理〕(**)

口腔内診査又は圧排のために用いる歯科用器具で、通常、ミラーヘッド及びハンドルからなるものをいう。

〔包装〕

1 袋（10 本入）、1 箱（100 本入）

〔原材料〕

A B S、ポリカーボネイト

〔寸法〕

全長 170mm ミラー部Φ22mm

【使用目的又は効果】(*)

本品は口腔内診察又は圧排のために用いる。

【使用方法等】(*)

本体ハンドル部を手に持ち、先端ミラー部により、口腔内の診察又は排圧に用いる。

【使用上の注意】

- ・ 損傷、変形、劣化の認められるものは使用しないこと。
- ・ 歯科医療従事者のみの使用に限られ、歯科用目的以外に使用しないこと。
- ・ 再使用しないこと。

【保管方法及び有効期間等】(*)

〔保管方法〕

- ・ 通気性のよい、汚染を受けない場所で保管すること。
- ・ 小児の手の届かない、適切な場所に保管すること。

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】(*)

製造販売業者 (株)ビーエスエーサクライ

住所

名古屋市天白区高島 1 丁目 117-1

T E L

052-805-1181

外国製造業者

テンソン メディカル インstrument カンパニー
デベロピング カンパニー リミテッド
Tennyson Medical Instrument
Developing CO., Ltd

国名

台湾