

添付文書
器 65 歯科用充填器
一般医療機器 歯科用ワックス形成器 JMDN : 35794000


デンタルコテライザーオートミニ

【禁忌・禁止】

- ・破損・変形・劣化品の使用禁止。

【形状・構造及び原理等】

【形状・構造】(**)

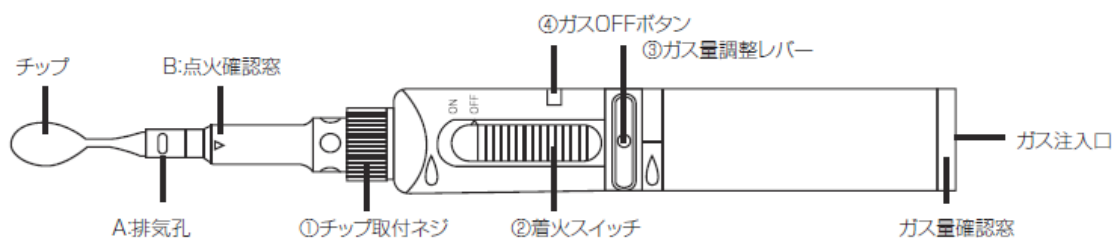

【原理】(**)

ワックスパターンを彫刻するために用いる歯科用器具をいう。通常、様々なサイズ及び形状の鈍な刃先をもち、ワックスパターン成形時にワックスを軟化させるために加熱することができる。

【包装】

本体×1、チップ3本(スプーンチップ、ホットカッター、ホットナイフ)、ガスボンベ 265CC×1

別売オプション

スプーンチップ (2本入)	ホットローチップ Φ1.5 (2本入)
ホットローチップ Φ4.7 (2本入)	ホットナイフ (2本入)
ホットカッター (2本入)	エレクトロユニット (2本入)
デンタルガス 480cc	ファイア (ガス) 480cc

【使用目的又は効果】

ワックスパターンを彫刻するために用いる歯科用器具をいう。通常、様々なサイズ及び形状の鈍な刃先をもち、ワックスパターン成形時にワックスを軟化させるために加熱することができる。

【使用方法等】(**)

詳細については、取扱説明書を必ず参照すること。

- ①本体にガスを注入する。
- ②ガス量調整レバーを中央に合わせる。
- ③着火スイッチをゆっくりと「カチッ」と音がするまで押し上げる。
- ④温度をガス量調整レバーで行う。
- ⑤使用后、ガスOFFボタンを押して消火する。

【使用上の注意】(**)

- ・損傷、変形、劣化がみられるものは使用しないこと。
- ・歯科医療従事者のみの使用に限られ、歯科用目的以外に使用しないこと。
- ・ガスの注入は、火気のある場所で行わないこと。
- ・使用中に燃料部分や高温金具等に、手や体を触れさせないこと。
- ・アルコールやアルコールベースのクリーナーで、ガス確認窓を拭かないこと。
- ・ガスは、純正ガス(工業用無臭液化ブタンガス)を使用すること。
- ・換気の悪い場所で使用しないこと。

【保管方法及び有効期間等】(*)

【保管方法】

- ・水に濡れないようにすること。
- ・小児の手の届かない、適切な場所に保管すること。
- ・40℃以上にある場所や直射日光の当たる場所に保管しないこと。

【製造販売業者及び製造業者等の氏名又は名称等】(*)

製造販売業者	株式会社ビーエスエーサクライ
住所	名古屋市天白区高島1丁目117-1
TEL	052-805-1181
製造業者	中島銅工株式会社 嵐山工場
国名	日本

詳細は、取扱説明書を参照のこと。