

添付文書
器 64 歯科用探針
一般医療機器 歯科用探針 JMDN : 35812000

2Way EXPLORER

【禁忌・禁止】

- ・ 本体と先端部の分離禁止。
- ・ 破損・変形・劣化品の使用禁止。

【形状、構造及び原理等】

【形状・構造】（**）

本品（2ウェイエクスプローラー）は、ステンレスの本体ハンドル部及びカーブした先端部より構成される両頭タイプのエクスプローラーである。



【原理】（**）

歯科診療で触診等に用いる手持型の器具（プローブ）をいう。軸の先端の細い作業部分は用途に応じて針状又は鉤型のもの、又は鈍的形状のものがある。

【包装】

1 パック（1 本入）

【原材料】（**）

ステンレス、シリコン

【使用目的又は効果】（*）

本品は歯科診療で触診等に用いる手持型の器具である。

【使用方法等】（**）

- ①使用にあたって滅菌を行う場合は、オートクレーブ滅菌（133℃以下）を行うこと。滅菌の方法はそれぞれの滅菌器、のメーカーの使用説明書にしたがって正しく行うこと。
- ②ハンドル部を把持し、カーブした先端部を口腔内に入れて触診等の診察を行う。

【使用上の注意】

- ・ 落下等衝撃を与えないこと。
- ・ 歯科医療従事者のみの使用に限られ、歯科用目的以外に使用しないこと。
- ・ 破損、変形、劣化、汚染がみられるものは使用しないこと。（**）
- ・ 再使用する時は、使用前に必ずオートクレーブ滅菌を行うこと。

- ・ オートクレーブ滅菌は 133℃以下で行うこと。（**）

- ・ オートクレーブ滅菌の方法は、それぞれの滅菌器のメーカーの使用説明書に従って正しく行うこと。（**）

【保管方法及び有効期間等】（*）

【保管方法】

- ・ 直射日光や高温、多湿な場所はさけて保管すること。
- ・ 水のかからない適切な場所に保管すること。

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】（*）

製造販売業者	株式会社ビーエスエーサクライ
住所	名古屋市天白区高島 1 丁目 117-1
TEL	052-805-1181
外国製造業者	オソン エムエスディー カンパニー
	OSUNG MND CO., LTD.
国名	韓国