

\*2025年5月（第5版）

\*\*2021年2月（第4版）

届出番号 23B2X00017000138

添付文書  
器 64 歯科用探針

一般医療機器 歯科用探針 JMDN : 35812000

## \* 2Way EXPLORER (2ウェイ エクスプローラ)

### 【禁忌・禁止】

- ・本体と先端部の分離禁止。
- ・破損・変形・劣化品の使用禁止。

### 【形状、構造及び原理等】

#### 〔形状・構造〕 (\*\*)

本品（2ウェイエクスプローラ）は、ステンレスの本体ハンドル部及びカーブした先端部より構成される両頭タイプのエクスプローラである。



### \*\* [原理]

歯科診療で触診等に用いる手持型の器具（プローブ）をいう。軸の先端の細い作業部分は用途に応じて針状又は鉤型のもの、又は鈍的形状のものがある。

### 〔包装〕

1パック（1本入）

### \*\* [原材料]

ステンレス、シリコン

### 【使用目的又は効果】

本品は歯科診療で触診等に用いる手持型の器具である。

### \*\* 【使用方法等】

- ①使用にあたって滅菌を行う場合は、オートクレーブ滅菌（133℃以下）を行うこと。滅菌の方法はそれぞれの滅菌器、のメーカーの使用説明書にしたがって正しく行うこと。
- ②ハンドル部を把持し、カーブした先端部を口腔内に入れて触診等の診察を行う。

### 【使用上の注意】

- ・落下等衝撃を与えないこと。
- ・歯科医療従事者のみの使用に限られ、歯科用目的以外に使用しないこと。
- \*\*・破損、変形、劣化、汚染がみられるものは使用しないこと。
- ・再使用する時は、使用前に必ずオートクレーブ滅菌を行うこと。

\*\*・オートクレーブ滅菌は133℃以下で行うこと。

\*\*・オートクレーブ滅菌の方法は、それぞれの滅菌器のメーカーの使用説明書に従って正しく行うこと。

### 【保管方法及び有効期間等】

#### 〔保管方法〕

- ・直射日光や高温、多湿な場所はさけて保管すること。
- ・水のかからない適切な場所に保管すること。

### 【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

製造販売業者 株式会社ビーエスエーサクライ  
住所 名古屋市天白区高島1丁目117-1  
TEL 052-805-1181  
外国製造業者 オソン エムエスディー カパニー  
OSUNG MND CO., LTD.  
国名 韓国